



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Устройство полимерное с твердым пористым стержнем для хранения и нанесения раствора фуорцина Фк -"ЛЕККЕР®"-2,3 (тип 2,3)
ТУ 9398-005-54291689-2004

1. Назначение

Устройство предназначено обработки кожи и профилактики раневой инфекции.

Раствор фуорцина обладает антисептическим, подсушивающим, противогрибковыми свойствами. Без рецепта врача.

Рекомендации по применению:

- грибковые и гнойниковые заболевания кожи
- ссадины
- трещины и эрозии кожи
- опрелости
- ветрянка, герпес

2. Способ применения

Наружно для индивидуального применения. Поврежденные участки кожи точечно обрабатывают раствором 2-4 раза в день

- Открыть колпачок;
- При помощи стержня обработать края раны или участок кожного покрова;
- Закрыть колпачок.

3. Меры предосторожности.

Противопоказано при индивидуальной непереносимости используемого раствора. Не наносить на обширные участки кожи. При обработке кожного покрова возникает кратковременное ощущение жжения, которые проходят самостоятельно. Раствор имеет своеобразный запах и красный цвет. Может пачкать белье.

4. Правила хранения и использования

Хранить плотно закрытым, в недоступном для детей месте при температуре от 5⁰ до 25⁰ С.

Срок годности 1,5 года (18 месяцев)