

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
ГРОДЗЕНСКАЕ ГАНДЛЕВА-
ВЫТВОРЧАЕ РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
вул. Ажэшкі, 11, 230023, г. Гродна
тэл. (0152) 74 43 92, факс 62 61 19
эл.пошта: pharmacia@mail.grodno.by
р/р BY81BLBB30120500059690001001 у Дырэкцыі ТАА
«Белінвестбанк» па Гродзенскай вобласці, БИК BLBBVY2X
АКПА 02013509, УНП 500059690

Міністэрства здравоахоўлення
Рэспублікі Беларусь
ГРОДНЕНСКОЕ ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
ул. Ожешко, 11, 230023, г. Гродно
тел. (0152) 74 43 92, факс 62 61 19
эл.почта: pharmacia@mail.grodno.by
р/с BY81BLBB30120500059690001001 в Дирекции ОАО
«Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК BLBBVY2X
ОКПО 02013509, УНП 500059690

04.03.2024 № 814
на № _____ ад _____

Інструкцыя

по применению вложений, входящих в аптечку
первой медицинской помощи для оснащения транспортных средств АТ-ГР
ТУ BY 500059690.001-2008 изм. «4»

(В соответствии с Приложением №3 к постановлению Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 23.11.2023 №178)

1. Бинт медицинский стерильный размер 5 м x 10 см - Перевязочное средство применяется в случае прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью, для фиксации повязок и тампонов, для остановки кровотечения, при перевязках для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания.
2. Бинт медицинский стерильный размер 7 м x 14 см - Перевязочное средство применяется в случае прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью, для фиксации повязок и тампонов, для остановки кровотечения, при перевязках для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания.
3. Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха – применяют для временной остановки кровотечения путем сжатия сосудов. Накладывают выше места ранения на одежду или предварительно подложенную ткань, под жгут помещается записка с указанием времени наложения жгута.
4. Лейкопластырь бактерицидный размер не менее 4 см x 10 см – применяют для лечения ссадин, порезов, небольших ран после ожогов. Снять защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить.
5. Ножницы атравматические для резки бинта и одежды - разрезать одежду над раной для полного осмотра поврежденной области в целом.
6. Одеяло изотермическое 160 см x 210 см - для сохранения тепла в критических ситуациях и оказания первой помощи[. Обернуть пострадавшего вверх его нательного белья, закрепить лейкопластырем, скотчем.
7. Пакет гипотермический (охлаждающий) – применяется в качестве холодного компресса при травмах (переломы, ушибы, гематомы, тепловые удары).
8. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный - для наложения повязок (давящей, асептической), для тугой тампонады ран, для закрытия выпавших внутренних органов, для фиксации шин.

9. Перекись водорода 3% - 40 мл - применяют в качестве дезинфицирующего и дезодорирующего средства для промывания ран.

10. Перчатки медицинские нестерильные - средство защиты кожи от биологических жидкостей. Надеть перед проведением осмотра пострадавшего и оказанием ему первой помощи.

11. Салфетка марлевая медицинская стерильная размером не менее 10 см x 10 см - применяются для изолирования раневых поверхностей от воздействия окружающей среды. Наложить салфетку, предварительно смоченную водой для улучшения контакта, на поврежденное место и зафиксировать лейкопластырем или бинтом.

12. Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100мг/мл в ампулах 1мл - салфетку или кусочек марли смоченный раствором подносят к носу на 0,5 - 1 секунды при обмороке, предобморочном состоянии. (вложено подчеркнуть)

Заместитель генерального директора
Гродненского РУП «Фармация»



Т.А. Зарецкая