

Инструкция по применению

Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН» емкостью 240 мл со средствами для промывания, 2 г, №30/№10 (Рецепт №1) к медицинскому изделию: Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН» емкостью 240 мл по ТУ 32.50.50-001-41078037-2019 (для взрослых).

Назначение: устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН» (далее – устройство) предназначено для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний посредством промывания и полоскания носоглотки раствором, изготовленным с применением средства для промывания. Устройство относится к изделиям индивидуального пользования и может применяться как в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений, так и в домашних условиях взрослыми и детьми от 12 лет. Для детей с 4 до 12 лет выпускается устройство оториноларингологическое для промывания «ДОЛФИН» емкостью 120 мл.

Показания: ринит при ОРВИ и гриппе, синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит), аллергический ринит, атрофический ринит, гипертрофический ринит, вазомоторный ринит, аденоидит, подготовка к операциям и реабилитация после операций в полости носа и околоносовых пазух. Устройство применяется также для профилактики этих заболеваний, промывания и полоскания носоглотки в гигиенических целях.

Противопоказания: полная непроходимость носовых ходов, острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, аденоиды III степени, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, возраст менее 4 лет.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют при соблюдении инструкции по применению.

Технические характеристики:

- Вместимость емкости: 240 мл;
- Высота устройства: 147 мм;
- Наружный диаметр емкости: 59 мм;
- Масса устройства: не более 37 г;
- Масса средства для промывания в одном пакете: 2 г.

Комплектность:

1. Устройство емкостью 240 мл для многократного применения;
2. Средство для промывания 30 или 10 пакетиков по 2 г (Рецепт №1) для однократного применения;
3. Инструкция по применению.

Средство для промывания:

Изделие применяется совместно со средством для промывания (Рецепт №1), 30 или 10 пакетиков по 2 г, входящим в комплект. Средство для промывания 30 пакетиков по 2 г также может приобретаться отдельно.

Состав средства для промывания (Рецепт №1):

- галил;
- соль поваренная пищевая йодированная;
- калий хлористый;
- натрий двууглекислый (сода пищевая);
- экстракт сухой – шиповник (плоды);
- экстракт сухой – солодка (корень).

Меры предосторожности:

- Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
- Не использовать устройство без насадки.
- Не использовать в положении лежа.
- Если нарушена проходимость носовых ходов и затруднено носовое дыхание, то перед процедурой необходимо высморкаться или закапать в нос сосудосуживающий препарат (не входит в комплект). Процедуру промывания носоглотки можно проводить через одну-две минуты после применения сосудосуживающего препарата.
- Не рекомендуется глотать раствор.
- Используйте только свежеразготовленный раствор средства для промывания.
- При высмаркивании приоткройте рот для того, чтобы избежать давления на барабанную перепонку.
- Не применяйте для приготовления раствора очень горячую или очень холодную воду.

При индивидуальной непереносимости шиповника и солодки применение противопоказано.

Внимание!

В течение 10–15 минут после промывания возможно выделение жидкости из носа, поэтому нежелательно делать процедуры непосредственно перед сном. В холодное время года желательно проводить промывание носа за 20–30 минут до выхода на улицу.

Способ применения

Промывание носа

Рекомендуемое число промываний в сутки: 2–4 раза или в соответствии с назначением врача.

Длительность применения: простудные заболевания – 2–4 недели в зависимости от тяжести заболевания, аллергический ринит – в течение всего периода высокой концентрации аллергенов, для профилактики ОРВИ – ежедневно в период эпидемии. Для гигиены полости носа – 1 раз в день ежедневно.

Устройство состоит из емкости для жидкости, трубки, насадки и крышки-дозатора. Перед первым применением разберите устройство и промойте его детально в мыльном растворе или в растворе питьевой соды (2 чайные ложки соды на стакан воды), ополосните в проточной воде, просушите.





Проверьте носовые ходы

Подышите попеременно каждой ноздрей, зажав противоположную ноздрю пальцем. Если проходимость хотя бы одного носового хода затруднена, обязательно очистите носовые ходы (высморкайтесь и/или воспользуйтесь сосудосуживающими препаратами).



Засыпьте средство в устройство и растворите в воде

Содержимое одного пакетика засыпьте в устройство и наполните его теплой кипяченой питьевой водой до верхней отметки (температура воды не должна превышать 36°C). Закройте емкость крышечкой с грубойкой и взболтайте до полного растворения средства.



Примите правильное положение

Возьмите в руки устройство с приготовленным раствором и наклонитесь вперед на 90°. Лицо обязательно должно быть параллельно полу. При промывании не поворачивайте голову в сторону.



Промойте нос

Плотно прижмите крышку устройства к промываемой ноздре. Глубоко вдохните, задержите дыхание, приоткройте рот на время проведения процедуры. Плавно, медленно, с минимальным давлением, сжимайте ем-

кость. При этом раствор равномерно заполняет промываемый носовой ход и вытекает наружу через другую ноздрю. Если во время процедуры часть раствора попала в рот, необходимо сплюнуть раствор.

Не меняя положения тела и головы, аналогичным способом промойте другой носовой ход. Промывайте по очереди левый и правый носовой ход, пока не закончится раствор в устройстве.

Освободите нос от жидкости

Когда раствор перестанет вытекать из противоположной ноздри, уберите устройство от носа и затем разоммите пальцы. Не меняя положения головы, высморкайтесь, держа рот приоткрытым.

Удалите остатки раствора

Для окончательного удаления из носовых ходов остатков раствора и слизи сожмите пустую емкость устройства, вдохните и задержите дыхание, закройте рот. Плотно приложите крышку устройства к правой ноздре, закрыв левую ноздрю пальцем свободной руки. Затем разоммите емкость, при этом емкость расправится. Также выполняется процедура удаления остатков раствора и слизи из левой ноздри. Голову можно поднять только после завершения процедуры.



После применения разберите устройство, промойте детали теплой водой с мылом средством, а затем проточной водой не менее трех раз, протрите и просушите.

Полоскание горла

Применять 1–2 раза в день или в соответствии с назначением врача. Растворите содержимое одного пакетика в 120 мл теплой кипяченой воды (1/2 стакана), температура воды не должна превышать 36°C. Раствор для полоскания готов.

Не глотайте раствор во время полоскания.

Рекомендуется проводить процедуру полоскания горла в том момент, когда вы чувствуете, что заболеваете, в период наступления холодов, в качестве профилактики сезонной заболеваемости ОРВИ, а также в гигиенических целях.

Дезинфекция

При использовании в условиях лечебно-профилактических учреждений все детали рекомендуется дезинфицировать в течение 30 минут 3% раствором перекиси водорода с 0,5 % раствором моющего средства при температуре 18–24°C. После дезинфекции промойте детали устройства не менее трех раз проточной водой.

Срок годности: 3 года. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от 0 до 25°C и влажности не выше 75%.

Утилизация: При применении в лечебном учреждении использованные изделия должны быть утилизированы в соответствии с правилами и инструкциями, действующими в лечебном учреждении для утилизации медицинских отходов класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Изделия с истекшим сроком годности, должны быть утилизированы, как медицинские отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

При применении в домашних условиях использованные изделия, а также изделия с истекшим сроком годности утилизируются как бытовые отходы.

Производитель, держатель регистрационного удостоверения и организация, принимающая претензии

ООО «Зентива Фарма», Россия, 127030, г. Москва, вн. тер. г. м. о. Тверской, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, пом. VI, +7 499 350 13 48, Info.Russia@zentiva.ru.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02703 от 31.03.2023 г.

Важно: внимательно ознакомиться с инструкцией. Правильное использование устройств и средств для промывания «ДОЛФИН®» поможет Вам безопасно достичь желаемого эффекта.

Дополнительную информацию смотрите на www.dolphin.ru

Дата последнего пересмотра эксплуатационной документации: май 2019



Инструкция по применению

Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛОИН®», емкость 120 мл со средствами для промывания, 1 г, № 30 (Рецепт № 1) к медицинскому изданию: Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛОИН®», емкость 120 мл по ТУ 32.50.50-001-41078037-2019 (для детей).

Назначение: устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛОИН®» (далее – устройство) предназначено для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний посредством промывания и полоскания носоглотки раствором, изготовленным с применением средства для промывания. Устройство относится к изделиям индивидуального пользования и может применяться как в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений, так и в домашних условиях детьми с 4 до 12 лет.

Показания: ринит при ОРВИ и гриппе, синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит), аллергический ринит, атрофический ринит, гипертрофический ринит, вазомоторный ринит, аденоидит, подготовка к операциям и реабилитация после операции в полости носа и околоносовых пазух. Устройство применяется также для профилактики этих заболеваний, промывания и полоскания носоглотки в гигиенических целях.

Противопоказания: полная непроходимость носовых ходов, острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, аденоиды III степени, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, возраст менее 4 лет.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют при соблюдении инструкции по применению.

Технические характеристики:

- Вместимость емкости: 120 мл;
- Высота устройства: 128 мм;
- Наружный диаметр емкости: 49 мм;
- Масса устройства: не более 27 г;
- Масса средства для промывания в одном пакетике: 1 г.

Комплектность:

1. Устройство емкостью 120 мл для многократного применения;
2. Средство для промывания 30 пакетиков по 1 г (Рецепт №1) для одноразового применения;
3. Инструкция по применению.
4. Книжка-раскраска.

Средство для промывания: Изделие применяется совместно со средством для промывания (Рецепт №1), 30 пакетиков по 1 г, входящим в комплект. Средство также может приобретаться отдельно.

Состав средства для промывания (Рецепт №1):

- Галит;
- соль поваренная пищевая йодированная;
- калий хлористый;
- натрий двууглекислый (сода пищевая);
- экстракт сухой – шиповник (плоды);
- экстракт сухой – солодка (корень).

Меры предосторожности:

- Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
- Не использовать устройство без насадки.
- Не использовать в положении лежа.
- Если нарушена проходимость носовых ходов и затруднено носовое дыхание, то перед процедурой необходимо высморкаться или закапать в нос сосудосуживающий препарат (не входит в комплект). Процедуру промывания носоглотки можно проводить через одну-две минуты после применения сосудосуживающего препарата.
- Не рекомендуется глотать раствор.
- Используйте только свежеприготовленный раствор средства для промывания.
- При высмаркивании приоткройте рот для того, чтобы избежать давления на барабанную перепонку.
- Не применяйте для приготовления раствора очень горячую или очень холодную воду.

При индивидуальной непереносимости шиповника и солодки применение противопоказано.

Внимание!

В течение 10–15 минут после промывания возможно выделение жидкости из носа, поэтому нежелательно делать процедуры непосредственно перед сном. В холодное время года желательно проводить промывание носа за 20–30 минут до выхода на улицу.

Способ применения

Промывание носа

Рекомендуемое число промываний в сутки: 2–4 раза или в соответствии с назначением врача.

Длительность применения: простудные заболевания – 2–4 недели в зависимости от тяжести заболевания, аллергический ринит – в течение всего периода высокой концентрации аллергенов, для профилактики ОРВИ – ежедневно в период эпидемии. Для гигиенических целей – 1 раз в день ежедневно.

Устройство состоит из емкости для жидкости, трубки, насадки и крышки-дозатора. Перед первым применением разберите устройство и промойте его детально в мыльном растворе или в растворе питьевой соды (2 чайные ложки соды на стакан воды), ополосните в проточной воде, просушите.





Проверьте носовые ходы

Попросите ребенка подышать поочередно каждой ноздрей, зажав противоположную ноздрю пальцем. Если проходимость хотя бы одного носового хода затруднена, обязательно очистите носовые ходы (попросите ребенка высморкаться или воспользуйтесь сосудоуживающими препаратами).



Засыпьте средство в устройство и растворите в воде

Содержимое одного пакетика насыпьте в устройство и наполните его теплой кипяченой питьевой водой до верхней отметки (температура воды не должна превышать 36°C). Закройте емкость крышечкой с трубочкой и взболтайте до полного растворения средства.



Примите правильное положение

Ребенок берет в руки устройство с приготовленным раствором и наклоняется вперед на 90°. Лицо обязательно должно быть параллельно полу. При промывании ребенок не должен поворачивать голову в сторону.



Промойте нос

Ребенок прижимает крышку устройства к промываемой ноздре. Глубоко вдыхает, задерживает дыхание, приоткрывает рот. Плавно, с минимальным давлением сам сжимает емкость. При этом раствор вытекает наружу через другую ноздрю. Не меняя положения тела и головы, аналогично ребенок промывает по очереди левый и правый носовой ход.



Освободите нос от жидкости

Когда раствор перестанет вытекать из противоположной ноздри, ребенок убирает устройство от носа и затем разжимает пальцы. Не меняя положения головы, высмаркивается, держа рот приоткрытым.



Удалите остатки раствора

Ребенок сжимает пустую емкость устройства, вдыхает и задерживает дыхание, закрывает рот. Прикладывает крышку устройства к правой ноздре, закрыв левую ноздрю пальцем свободной руки. Затем разжимает емкость. Также выполняется процедура удаления остатков из левой ноздри. Голову можно поднять только после завершения процедуры.

После применения разберите устройство, промойте детали теплой водой с моющим средством, а затем проточной водой не менее трех раз, протрите и просушите.

Полоскание горла

Применять 1–2 раза в день или в соответствии с назначением врача. Растворите содержимое одного пакетика в 60 мл теплой кипяченой воды (1/4 стакана), температура воды не должна превышать 36°C. Раствор для полоскания готов.

Не глотайте раствор во время полоскания.

Рекомендуется проводить процедуру полоскания горла в том момент, когда вы чувствуете, что заболеваете, в период наступления холодов, в качестве профилактики сезонной заболеваемости ОРВИ, а также в гигиенических целях.

Дезинфекция

При использовании в условиях лечебно-профилактических учреждений все детали рекомендуется дезинфицировать в течение 30 минут 3% раствором перекиси водорода с 0,5 % раствором моющего средства при температуре 18–24°C. После дезинфекции промойте детали устройства не менее трех раз проточной водой.

Срок годности: 3 года. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от 0 до 25 °C и влажности не выше 75%.

Утилизация: при применении в лечебном учреждении использованные изделия должны быть утилизированы в соответствии с правилами и инструкциями.

действующими в лечебном учреждении для утилизации медицинских отходов класса Б в соответствии с СанПин 2.1.7.2790. Изделия с истекшим сроком годности, должны быть утилизированы, как медицинские отходы класса А в соответствии СанПин 2.1.7.2790.

При применении в домашних условиях использованные изделия, а также изделия с истекшим сроком годности утилизируются как бытовые отходы.

Производитель, держатель регистрационного удостоверения и организация, принимающая претензии

ООО «Зентива Фарма», Россия, 127030, г. Москва, вн. тер. г. м. о. Тверской, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, пом. VI, +7 499 350 13 48. Info.Russia@zentiva.ru.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02703 от 31.03.2023 г.

Важно: внимательно ознакомиться с инструкцией. Правильное использование устройства и средств для промывания «ДОЛОУИН®» поможет Вам безопасно достичь желаемого эффекта.

Дополнительную информацию смотрите на www.dofrin.ru.

Дата последнего пересмотра эксплуатационной документации: май 2019



Инструкция по применению

Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН»[®], емкостью 240 мл со средствами для промывания, 2 г, №30 (Рецепт №2) к медицинскому изделию: Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН»[®], емкостью 240 мл по ТУ 32.50.50-001-41078037-2019 (для взрослых).

Назначение: устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН»[®] (далее – устройство) предназначено для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний посредством промывания и полоскания носоглотки раствором, изготовленным с применением средства для промывания. Устройство относится к изделиям индивидуального пользования и может применяться как в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений, так и в домашних условиях взрослых и детей от 12 лет. Для детей с 4 до 12 лет допускается применение, используя для промывания примерно половину объема.

Показания: ринит при ОРВИ и гриппе, синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит), аллергический ринит, атрофический ринит, гипертрофический ринит, вазомоторный ринит, аденоидит, подготовка к операциям и реабилитация после

операций в полости носа и околоносовых пазух. Устройство применяется также для профилактики этих заболеваний, промывания и полоскания носоглотки в гигиенических целях.

Противопоказания: полная непроходимость носовых ходов, острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, аденоиды III степени, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, возраст менее 4 лет.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют при соблюдении инструкции по применению.

Технические характеристики:

- Вместимость емкости: 240 мл;
- Высота устройства: 147 мм;
- Наружный диаметр емкости: 59 мм;
- Масса устройства: не более 37 г;
- Масса средства для промывания в одном пакете: 2 г.

Комплектность:

1. Устройство емкостью 240 мл для многократного применения;
2. Средство для промывания 30 пакетиков по 2 г (Рецепт №2) для однократного применения;
3. Инструкция по применению.

Средство для промывания:

Изделие применяется совместно со средством для промывания (Рецепт №2), 30 пакетиков по 2 г, входящим в комплект.

Средство также может приобретаться отдельно.

Состав средства для промывания (Рецепт №2):

- галит;
- натрий двууглекислый (сода пищевая).

Меры предосторожности:

- Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
- Не использовать устройство без насадки.
- Не использовать в положении лежа.
- Если нарушена проходимость носовых ходов и затруднено носовое дыхание, то перед процедурой необходимо высморкаться и/или закапать в нос сосудосуживающий препарат (не входит в комплект). Процедуру промывания носоглотки можно проводить через одну-две минуты после применения сосудосуживающего препарата.
- Не рекомендуется глотать раствор.
- Используйте только свежеприготовленный раствор средства для промывания.
- При высмаркивании приоткройте рот для того, чтобы избежать давления на барабанную перепонку.
- Не применяйте для приготовления раствора очень горячую или очень холодную воду.

Внимание!

В течение 10–15 минут после промывания возможно выделение жидкости из носа, поэтому нежелательно делать процедуры непосредственно перед сном. В холодное время года желательно проводить промывание носа за 20–30 минут до выхода на улицу.

Способ применения

Промывание носа

Рекомендуемое число промываний в сутки: 2–4 раза или в соответствии с назначением врача.

Длительность применения: простудные заболевания – 2–4 недели в зависимости от тяжести заболевания, аллергический ринит – в течение всего периода высокой концентрации аллергенов, для профилактики ОРВИ – ежедневно в период эпидемии. Для гигиены полости носа – 1 раз в день ежедневно.

Устройство состоит из емкости для жидкости, трубки, насадки и крышки-дозатора. Перед первым применением разберите устройство и промойте его детали в мыльном растворе или в растворе питьевой соды (2 чайные ложки соды на стакан воды), ополосните в проточной воде, просушите.





Проверьте носовые ходы

Подышите поочередно каждой ноздрей, зажав противоположную ноздрю пальцем. Если проходимость хотя бы одного носового хода затруднена, обязательно очистите носовые ходы (высморгайтесь или воспользуйтесь сосудосуживающими препаратами).



Засыпьте средство в устройство и растворите в воде

Содержимое одного пакетика засыпьте в устройство и наполните его теплой кипяченой питьевой водой до верхней отметки (температура воды не должна превышать 36°C). Закройте емкость крышечкой с трубочкой и взболтайте до полного растворения средства.



Примите правильное положение

Возьмите в руки устройство с приготовленным раствором и наклонитесь вперед на 90°. Лицо обязательно должно быть параллельно полу. При промывании не поворачивайте голову в сторону.



Промойте нос

Плотно прижмите крышку устройства к промываемой ноздре. Глубоко вдохните, задержите дыхание, приоткройте рот на время проведения процедуры. Плавно, медленно, с минимальным давлением сжимайте ем-

кость. При этом раствор равномерно заполняет промываемый носовой ход и вытекает наружу через другую ноздрю. Если во время процедуры часть раствора попала в рот, необходимо сплюнуть раствор.

Не меняя положения тела и головы, аналогичным способом промойте другой носовой ход. Промывайте по очереди левый и правый носовой ход, пока не закончится раствор в устройстве.

Освободите нос от жидкости

Когда раствор перестанет вытекать из противоположной ноздри, уберите устройство от носа и затем разоммите пальцы. Не меняя положения головы, высморкайтесь, держа рот приоткрытым.

Удалите остатки раствора

Для окончательного удаления из носовых ходов остатков раствора и слизи сожмите пустую емкость устройства, вдохните и задержите дыхание, закройте рот. Плотно приложите крышку устройства к правой ноздре, закрыв левую ноздрю пальцем свободной руки. Затем разоммите емкость, при этом емкость расправится. Также выполняется процедура удаления остатков раствора и слизи из левой ноздри. Голову можно поднять только после завершения процедуры.

После применения разберите устройство, промойте детали теплой водой с мыльным средством, а затем проточной водой не менее трех раз, протрите и просушите.

Полоскание горла

Применять 1–2 раза в день или в соответствии с назначением врача. Растворите содержимое одного пакетика в 120 мл теплой кипяченой воды (1/2 стакана), температура воды не должна превышать 36°C. Раствор для полоскания готов.

Не глотайте раствор во время полоскания. Рекомендуется проводить процедуру полоскания горла в том момент, когда вы чувствуете, что заболели, в период наступления холодов, в качестве профилактики сезонной заболеваемости ОРВИ, а также в гигиенических целях.

Дезинфекция

При использовании в условиях лечебно-профилактических учреждений все детали рекомендуется дезинфицировать в течение 30 минут 3% раствором перекиси водорода с 0,5% раствором моющего средства при температуре 18–24°C. После дезинфекции промойте детали устройства не менее трех раз проточной водой.

Срок годности: 3 года. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от 0 до 25°C и влажности не выше 75%.

Утилизация: при применении в лечебном учреждении использованные изделия должны быть утилизированы в соответствии с правилами и инструкциями, действующими в лечебном учреждении для утилизации медицинских отходов класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Изделия с истекшим сроком годности, должны быть утилизированы, как медицинские отходы класса А в соответствии СанПиН 2.1.7.2790.

При применении в домашних условиях использованные изделия, а также изделия с истекшим сроком годности утилизируются как бытовые отходы.

Производитель, держатель регистрационного удостоверения и организация, принимающая претензии

ООО «Зентива Фарма», Россия, 127030, г. Москва, вн. тер. г. м. о. Тверской, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, пом. VI, +7 499 350 13 48. Info.Russia@zentiva.ru.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02703 от 31.03.2023 г.

Важно: внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Правильное использование устройства и средств для промывания «ДОЛФИН®» поможет Вам безопасно достичь желаемого эффекта.

Дополнительную информацию смотрите на www.dolphin.ru.

Дата последнего пересмотра эксплуатационной документации: май 2019.



Инструкция по применению

Средство для промывания, 2 г, №30 (Рецепт №1) к медицинскому изделию: Устройство оприноларитологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН» емкостью 240 мл по ТУ 32.50.50-001-41078037-2019 (для взрослых).

Назначение

Средство для промывания (далее – средство) применяется с устройством оприноларитологическим для промывания индивидуальным «ДОЛФИН» (далее – устройство). Средство предназначено для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний посредством промывания и полоскания носоглотки раствором, изготовленным с применением средства для промывания.

Устройство относится к изделиям индивидуального пользования и может применяться как в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений, так и в домашних условиях взрослыми и детьми от 12 лет. Для детей с 4 до 12 лет высушивается Устройство оприноларитологическое для промывания «ДОЛФИН» емкостью 20 мл со средствами для промывания.

Показания
Ринит при ОРВИ и гриппе, синусит (гайморит, фронтит, этмоидит), аллергический ринит, атрофический ринит, гипертрофический ринит, вазомоторный ринит, аденоидит, подготовка к операциям и реабилитация после операций в полости носа и околоносовых пазух. Устройство применяется также для профилактики эти заболевания, промывания и полоскания носоглотки в гигиенических целях.

Противопоказания

Полная непроходимость носовых ходов, острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, аденоиды III степени, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, возраст менее 4 лет.

Возможные побочные эффекты

Отсутствуют при соблюдении инструкции по применению.

Технические характеристики

Масса средства для промывания в одном пакете: 2 г.

Комплектность

1. Средство для промывания 30 пакетиков по 2 г (Рецепт №1) для одноразового применения;
2. Инструкция по применению.

Состав средства для промывания (Рецепт №1)

- Галил;
- соль повидонная пищевая гидролизованная;
- калий фторидный;
- натрий дигидрофосфат (содя пищевой);
- экстракт сухой – шиповник (плоды);
- экстракт сухой – солодка (корень).

Средство может вводиться в комплект устройства оприноларитологического для промывания индивидуального «ДОЛФИН» емкостью 240 мл или присоединяться отдельно.

Меры предосторожности

- Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
- Не рекомендуется плотная установка раствора в полости носа, возраст менее 4 лет.
- Используйте только свежеприготовленный раствор средства для промывания.
- Не применяйте для промывания раствора очень горячую или очень холодную воду.

При индивидуальной непереносимости шиповника и солодки применение противопоказано.

Внимание!

В течение 10–15 минут после промывания возможно выделение жидкости из носа, поэтому исключательно избегать процедуры непосредственно перед сном.

Промыве носовые ходы

Подышите попеременно каждой ноздрей, задерживая дыхание, приоткрыв рот на время проведения процедуры. Плавно, медленно, с минимальным давлением сжимайте емкость. При этом раствор равномерно заполняет промываемый носовой ход и вытекает наружу через другую ноздрю. Если во время проведения часть раствора попала в рот, необходимо сплюнуть раствор.

Засыпьте средство в устройство и растворите в воде

Содержимое одного пакетика засыпьте в пакетика засыпьте в устройство и налейте его теплой кипяченой воды до верхней отметки (температура воды не должна превышать 36°С).

Закройте емкость крышкой с трубой и взболтайте до полного растворения средства. Раствор готов к применению.

Примите правильное положение

Возьмите в руки устройство с приготовленным раствором и наклонитесь вперед на 90°. Лицо обязательно должно быть параллельно полу. При промывании не поворачивайте голову в сторону.



Полно прижмите крышку устройства к промываемой ноздре. Глубоко вдохните, задерживая дыхание, приоткрыв рот на время проведения процедуры. Плавно, медленно, с минимальным давлением сжимайте емкость. При этом раствор равномерно заполняет промываемый носовой ход и вытекает наружу через другую ноздрю. Если во время проведения часть раствора попала в рот, необходимо сплюнуть раствор.

Не меняя положения тела и головы, аналогичным способом промойте другую носовую ход. Промывайте по очереди левый и правый носовой ход, пока не закончится раствор в устройстве.

Освободите нос от жидкости

Когда раствор перестанет вытекать из промываемой ноздри, уберите устройство от носа и затем разожмите пальцы. Не меняя положения головы, высморкайтесь, держа рот приоткрытым.

Удалите остатки раствора

Для окончательного удаления жидкости из носовых ходов оставов раствора и слизи сжимайте пустую емкость устройства, вращивая ее.

те и задерживая дыхание, закройте рот. Полностью прижмите крышку устройства к правой ноздре, закрыв левую ноздрю пальцем свободной руки. Затем разожмите емкость, при этом емкость расправится. Также выполняются процедура удаления остатков раствора и слизи из левой ноздри. Голову можно подержать только после завершения процедуры.

После применения разберите устройство, промойте детали теплой водой с моющим средством, а затем проточной водой не менее трех раз, прогрите и просушите.

Полоскание горла

Применять 1–2 раза в день или в соответствии с назначением врача.

Растворите содержимое одного пакетика в 20 мл теплой кипяченой воды (1/2 стакана), температура воды не должна превышать 36°С. Раствор для полоскания готов.

Не лгйте раствор во время полоскания. Рекомендуется проводить процедуру полоскания горла в том момент, когда вы чувствуете, что заболели, в период наступления холодов, в качестве профилактики сезонной заболеваемости ОРВИ, а также в гигиенических целях.

Дата последнего пересмотра эксплуатационной документации: май 2019.

Утилизация: При применении в лечебном учреждении изделие с истекшим сроком годности, должны быть утилизированы, как медицинские отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. При применении в домашних условиях изделие с истекшим сроком годности утилизируется как бытовые отходы.

Производитель, держатель регистрационного удостоверения и организация, принимающая претензии
ООО «Зентива Фарма», Россия, 127030, Г. Москва, вн. тер. г. м. о. Тверской, ул. Новолосовская, д. 31, стр. 4, пом. VI, +7 499 350 13 48, info.russia@zentiva.ru.

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2008/02703 от 31.03.2023 г.

Важно: внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Правильное использование устройства и средств для промывания «ДОЛФИН» поможет Вам эффективно и безопасно достичь желаемого эффекта. Дополнительную информацию смотрите на www.dolphin.ru.



Инструкция по применению

Средство для промывания, 1г, № 30 (Рецепт №1) к медицинскому названию: Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН» емкостью 120 мл по ТУ 32.50.50-001-41078037-2019 (для детей).

Назначение

Средство для промывания (далее – средство) применяется с Устройством оториноларингологическим для промывания индивидуальным «ДОЛФИН» (далее – устройство). Средство предназначено для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний посредством промывания и полоскания носоглотки раствором, изготовленным с применением средства для промывания.

Устройство относится к изделиям индивидуального пользования и может применяться как в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений, так и в домашних условиях детьми от 4 лет.

Для взрослых и детей с 12 лет выпускается устройство оториноларингологическое

свое для промывания «ДОЛФИН» емкостью 240 мл со средствами для промывания.

Показания

Ринит при ОРВИ и гриппе, синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит), аллергический ринит, вазомоторный ринит, аденитит, подготовка к операциям и реабилитация после операций в полости носа и околоносовых пазух, профилактика гриппа и ОРВИ. Устройство применяется также для профилактики этих заболеваний, промывания и полоскания носоглотки в гигиенических целях.

Противопоказания

полная необходимость носовых ходов, острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, анемоды III степени, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, возраст менее 4 лет.

Возможные побочные эффекты

Отсутствуют при соблюдении инструкции по применению.

Технические характеристики

• Макс. средства для промывания в одном пакете: 1г.

Комплектность

1. Средство для промывания 30 пакетиков по 1г (Рецепт №1) для одноразового применения;
2. Инструкция по применению.

Состав средства для промывания (Рецепт №1)

- соль поваренная пищевая йодированная;
 - калий хлористый;
 - натрий двууглекислый (сладкий пищевой);
 - экстракт сухой – шиповника (плоды);
 - экстракт сухой – солодки (корень).
- Средство может входить в комплект Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН» емкостью 120 мл или приобретаться отдельно.

Меры предосторожности

- Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
- Не рекомендуется глотать раствор.
- Используйте только свежеразготовленный раствор; средства для промывания.
- Не применяйте для приготовления раствора очень горячую или очень холодную воду.

При индивидуальной непереносимости шиповника и солодки применение противопоказано.

Проверьте носовые ходы

Попросите ребенка показать пальцем, куда выдыхает воздух перед сном. В холодное время года желательно проводить промывание носа за 20–30 минут до выхода на улицу.

Засыпьте средство и растворите в воде

Содержимое одного пакетика засыпьте в устройство и налейте в него теплой кипяченой воды до верхней отметки (температура воды не должна превышать 36°С). Зарядите емкость крышечкой с трубочкой и взболтайте до полного растворения средства. Раствор готов к применению. Рекомендуемое число промываний в сутки: 7–4 раза или в соответствии с назначением врача.

Примите правильное положение

Ребенок берет в руки устройство с приготовленным раствором и наклоняется вперед на 90°. Лицо обязательно должно быть параллельно полу. При промывании ребенок не должен поворачивать голову в сторону.

Промойте нос

Ребенок плотно прижимает крышку устройства к правой ноздре. Глубоко выдыхает воздух свободной рукой. Затем разжимает емкость, при этом емкость расширяется. Также выполняется процедура удаления остатка раствора и слизи из левой ноздри. Голову можно поднимать только после завершения процедуры. После применения разберите устройство, промойте детали теплой водой с моющим средством, а затем проточной водой не менее трех раз, протрите и просушите.

Освободите нос от жидкости

Когда раствор перестает вытекать из противоположной ноздри, ребенок убирает устройство от носа и затем разжимает пальцы. Не меняя положения головы, высмаркивается, держа рот приоткрытым.

Удалите остатки раствора

Для окончательного удаления из носовых ходов остатков раствора и слизи ребенка

бенж смывает пустую емкость устройства, высушивает и закрывает крышку. Закрывает рот. Плотно прижимает крышку устройства к правой ноздре. Затем глубоко выдыхает воздух свободной рукой. Затем разжимает емкость, при этом емкость расширяется. Также выполняется процедура удаления остатка раствора и слизи из левой ноздри. Голову можно поднимать только после завершения процедуры.

Полоскание горла

После применения разберите устройство, промойте детали теплой водой с моющим средством, а затем проточной водой не менее трех раз, протрите и просушите.

Полоскание горла

Применять 1–2 раза в день или в соответствии с назначением врача. Растворите содержимое одного пакетика в 60 мл теплой кипяченой воды (1/4 стакана). Температура воды не должна превышать 36°С. Раствор для полоскания готов.

Не пейте раствор во время полоскания. Рекомендуется проводить процедуру полоскания горла в том момент, когда вы чувствуете, что заболели, в период наступления холодов, в качестве профилактики сезонной заболеваемости ОРВИ, а также в гигиенических целях.

Срок годности

3 года. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от 0 до 25°С и влажности не выше 75%. Дата последнего пересмотра эксплуатационной документации: май 2019

Утилизация

При применении в лечебном учреждении изделия с истекшим сроком годности, должны быть утилизированы, как медицинские отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.13.2950.

Производитель, держатель регистрационного удостоверения и организация, принимающая претензии

000 «Зентива Фэрма», Россия, 127030, г. Москва, вн. тер. г. м. о. Тверской, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, пом. VI, +7 495 350 13 48, info.russia@zentiva.ru.

Регистрационное удостоверение

№ ФСР 2018/02703 от 31.03.2019 г.

Важно: анимально не исследовано. Не пейте раствор во время полоскания. Рекомендуется проводить процедуру полоскания горла в том момент, когда вы чувствуете, что заболели, в период наступления холодов, в качестве профилактики сезонной заболеваемости ОРВИ, а также в гигиенических целях.

Дополнительную информацию смотрите на www.dolphin.ru.

Дата последнего пересмотра эксплуатационной документации: май 2019



Инструкция по применению

Средство для промывания, 2 г, № 30 (Рецепт № 2) к медицинскому изделию: Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛОНЬ» емкостью 240 мл по ТУ 32.50.50-001-41078037-2019 (для взрослых).

Назначение
Средство для промывания (далее – средство) применяется с устройством оториноларингологическим для промывания индивидуальным «ДОЛОНЬ» (далее – устройство). Средство предназначено для лечения и профилактики ЛОР-заболевания посредством промывания и полоскания носолотки раствором, изготовленным с применением средства для промывания.
Устройство относится к изделиям индивидуального пользования и может применяться как в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений, так и в домашних условиях взрослыми и детьми от 12 лет. Для детей – с 4 до 12 лет дозу

следует применять, используя для промывания примерно половину объема.

Показания
Ринит при ОРВИ и гриппе, синусит (гайморит, фронтит, этмоидит), аллергический ринит, атрофический ринит, гипертрофический ринит, вазомоторный ринит, деформация подготавливания к операциям и реабилитация после операции в полости носа и околоносовых пазух. Устройство применяется также для профилактики этик заболеваний, протравывания и полоскания носолотки в гигиенических целях.

Противопоказания
Полная непроходимость носовых ходов, острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, деформация III степени, острые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, возраст менее 4 лет.

Возможные побочные эффекты
Отсутствуют при соблюдении инструкции по применению.

Технические характеристики
Масса средства для промывания в одном пакете 2 г.

Комплекность
1. Средство для промывания 30 пакетиков по 2 г (Рецепт № 2) для однократного применения.
2. Инструкция по применению.

Состав средства для промывания (Рецепт № 2)
• Галин;
• натрия двууглекислый (содя пищевой).
Средство может вводиться в комплект Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛОНЬ» в количестве 240 мл или приобретаться отдельно.

Меры предосторожности
• Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
• Не рекомендуется глотать раствор.
• Используйте только стерилизованный раствор средства для промывания.
• Не применяйте для промывания раствора очень горячую или очень холодную воду.

Внимание! В течение 10–15 минут после промывания возможно выделение жидкости из носа, поэтому желательно делать процедуры непосредственно перед сном. В холодное время года желательно промывать нос за 20–30 минут до выхода на улицу.

Способ применения

Промывание носа
1. Разорвите пакетик со средством и высыпьте его содержимое в емкость устройства.
2. Налейте в емкость устройства теплую кипяченую воду (температура воды не должна превышать 35°C).
3. Закройте емкость крышечкой с трубой и выждите до полного растворения средства. Раствор готов к применению.
Рекомендуемое число промываний в сутки – 2–4 раза или в соответствии с назначением врача.
Длительность промывания: постназальное промывание – 2–4 минуты в зависимости от тяжести заболевания, интраназальное промывание – в течение всего периода высокой концентрации аллергенов, для профилактики ОРВИ – ежедневно в период эпидемии.
Для легкого постназального промывания – 1 раз в день ежедневно.



Проверьте носовые ходы
Подышите почердевшей на каждой ноздрю, задержите дыхание, приоткройте рот на время проверки процедуры. Правое, медленно, с минимальным давлением сжимайте емкость. При этом раствором равномерно заполнит промываемый носовой ход и вытеснит наружу через другую ноздрю. Если во время процедуры часть раствора попала в рот, необходимо сплюнуть раствор. Не меняйте положение тела и головы, аналогичным способом промойте другую ноздрю ход.
Промывайте по очереди левый и правый носовой ход, пока не закончится раствор в устройстве.

Засыпьте средство в устройство и растворите в воде
Содержимое одного пакетика засыпьте в устройство и наполните его теплой кипяченой водой до верхней отметки. Температура воды не должна превышать 35°C.
Закройте емкость крышечкой с трубой и выждите до полного растворения средства.



Примите правильное положение
Возьмите в руки устройство с приспособленным раствором и наклонитесь вперед на 90°. Лицо обязательно должно быть параллельно полу. При промывании не поворачивайте голову в сторону.



Промойте нос
Полно прижмите крышку устройства к промываемой ноздре. Глубоко вдыхайте, задержите дыхание, приоткройте рот на время проверки процедуры. Правое, медленно, с минимальным давлением сжимайте емкость. При этом раствором равномерно заполнит промываемый носовой ход и вытеснит наружу через другую ноздрю. Если во время процедуры часть раствора попала в рот, необходимо сплюнуть раствор. Не меняйте положение тела и головы, аналогичным способом промойте другую ноздрю ход.
Промывайте по очереди левый и правый носовой ход, пока не закончится раствор в устройстве.

Освободите нос от жидкости
Когда раствор перестанет вытекать из промываемой ноздри, уберите устройство от носа и затем разожмите пальцами, держа рот приоткрытым.



Удалите остатки раствора
Для окончательного удаления из носовых ходов остатков раствора и слизи сожмите пустую емкость устройства, вдыхайте

Утилизация: При применении в лечебном учреждении изделия с утилизированном гофрированном, должны быть утилизированы, как медицинские отходы класса А в соответствии СанПиН 2.1.7.2790.
При применении в домашних условиях изделия с истекшим сроком годности утилизируются как бытовые отходы.

Производитель, держатель регистрационного удостоверения и организация, принимающая претензии
ООО «Зентива Фарма», Россия, 127030, г. Москва, вн. тер. г. м. о. Тверской, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, пом. VI, +7 499 350 13 48. info.zentiva@zeptor.ru.

Регистрационные Удостоверение
№ ФСР 200802703 от 31.03.2013 г.
Важно: выключительно саннакомель с ин-струкциями. Правильное использование устройства и средства для промывания «ДОЛОНЬ» поможет Вам безболезненно достичь желаемого эффекта.
Дополнительную информацию смотрите на www.dolon.ru

Дата последнего пересмотра эксплуатационной документации: май 2019



Инструкция по применению

Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛОФИН®», емкость 240 мл со средствами для промывания, 2 г, №30/№*10 (Рецепт №*) к медицинскому изделию: Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛОФИН®», емкость 240 мл по ТУ 32.50.50-001-41078037-2019 (для взрослых).

Назначение: устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛОФИН®», (далее – устройство) предназначено для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний посредством промывания и полоскания носоглотки раствором, изготовленным с применением средства для промывания. Устройство относится к изделиям индивидуального пользования и может применяться как в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений, так и в домашних условиях взрослыми и детьми от 12 лет. Для детей с 4 до 12 лет выпускается устройство оториноларингологическое для промывания «ДОЛОФИН®», емкость 120 мл.

Показания: ринит при ОРВИ и гриппе, синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит), аллергический ринит, атрофический ринит, гипертрофический ринит, вазомоторный ринит, аденоидит, подготовка к операциям и реабилитация после операций в полости носа и околоносовых пазух. Устройство применяется также для профилактики этих заболеваний, промывания и полоскания носоглотки в гигиенических целях.

Противопоказания: полная непроходимость носовых ходов, острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, аденоиды III степени, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, возраст менее 4 лет.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют при соблюдении инструкции по применению.

Технические характеристики:

- Вместимость емкости: 240 мл;
- Высота устройства: 147 мм;
- Наружный диаметр емкости: 59 мм;
- Масса устройства: не более 37 г;
- Масса средства для промывания в одном пакетике: 2 г.

Комплектность:

1. Устройство емкостью 240 мл для многократного применения;
2. Средство для промывания 30 или 10 пакетиков по 2 г (Рецепт №*) для разового применения;
3. Инструкция по применению.

Средство для промывания:

Изделие применяется совместно со средством для промывания (Рецепт №*), 30 или 10 пакетиков по 2 г, входящим в комплект. Средство для промывания 30 пакетиков по 2 г также может приобретаться отдельно.

Состав средства для промывания (Рецепт №*):

- галии;
- соль поваренная пищевая йодированная;
- калий хлористый;
- натрий двууглекислый (сода пищевая);
- экстракт сухой – шиповник (плоды);
- экстракт сухой – солодка (корень).

Меры предосторожности:

- Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
- Не использовать устройство без насадки.
- Не использовать в положении лежа.
- Если нарушена проходимость носовых ходов и затруднено носовое дыхание, то перед процедурой необходимо высморкаться и/или закапать в нос сосудосуживающий препарат (не входит в комплект). Процедуру промывания носоглотки можно проводить через одну-две минуты после применения сосудосуживающего препарата.
- Не рекомендуется глотать раствор.
- Используйте только свежеприготовленный раствор средства для промывания.
- При высмаркивании приоткройте рот для того, чтобы избежать давления на барабанную перепонку.
- Не применяйте для приготовления раствора очень горячую или очень холодную воду.

При индивидуальной непереносимости шиповника и солодки применение противопоказано.

Внимание!

В течение 10–15 минут после промывания возможно выделение жидкости из носа, поэтому нежелательно делать процедуры непосредственно перед сном. В холодное время года желательно проводить промывание носа за 20–30 минут до выхода на улицу.

Способ применения

Промывание носа

Рекомендуемое число промываний в сутки: 2–4 раза или в соответствии с назначением врача.

Длительность применения: простудные заболевания – 2–4 недели в зависимости от тяжести заболевания, аллергический ринит – в течение всего периода высокой концентрации аллергенов, для профилактики ОРВИ – ежедневно в период эпидемии. Для гигиены полости носа – 1 раз в день ежедневно.

Устройство состоит из емкости для жидкости, трубки, насадки и крышки-дозатора. Перед первым применением разберите устройство и промойте его детально в мыльном растворе или в растворе питьевой соды (2 чайные ложки соды на стакан воды), ополосните в проточной воде, просушите.





Проверьте носовые ходы

Подышите попеременно каждой ноздрей, зажав противоположную ноздрю пальцем. Если проходимость хотя бы одного носового хода затруднена, обязательно очистите носовые ходы (высморкайтесь или воспользуйтесь сосудосуживающими препаратами).



Засыпьте средство в устройство и растворите в воде

Содержимое одного пакетика засыпьте в устройство и наполните его теплой кипяченой питьевой водой до верхней отметки (температура воды не должна превышать 36°C). Закройте емкость крышечкой с трубочкой и взболтайте до полного растворения средства.



Примите правильное положение

Возьмите в руки устройство с приготовленным раствором и наклонитесь вперед на 90°. Лицо обязательно должно быть параллельно полу. При промывании не поворачивайте голову в сторону.



Промойте нос

Плотно прижмите крышку устройства к промываемой ноздре. Глубоко вдохните, задержите дыхание, приоткройте рот на время проведения процедуры. Плавно, медленно, с минимальным давлением сжимайте ем-

кость. При этом раствор равномерно заполняет промываемый носовой ход и вытекает наружу через другую ноздрю. Если во время процедуры часть раствора попала в рот, необходимо сплюнуть раствор.

Не меняя положения тела и головы, аналогичным способом промойте другой носовой ход. Промывайте по очереди левый и правый носовой ход, пока не закончится раствор в устройстве.

Освободите нос от жидкости

Когда раствор перестанет вытекать из противоположной ноздри, уберите устройство от носа и затем разожмите пальцы. Не меняя положения головы, высморкайтесь, держа рот приоткрытым.

Удалите остатки раствора

Для окончательного удаления из носовых ходов остатков раствора и слизи сожмите пустую емкость устройства, вдохните и задержите дыхание, закройте рот. Плотно приложите крышку устройства к правой ноздре, закройте левую ноздрю пальцем свободной руки. Затем разожмите емкость, при этом емкость расправится. Также выполняется процедура удаления остатков раствора и слизи из левой ноздри. Голову можно поднять только после завершения процедуры.

После применения разберите устройство, промойте детали теплой водой с мыльным средством, а затем проточной водой не менее трех раз, протрите и просушите.

Полоскание горла

Применять 1–2 раза в день или в соответствии с назначением врача.

Растворите содержимое одного пакетика в 120 мл теплой кипяченой воды (1/2 стакана), температура воды не должна превышать 36°C. Раствор для полоскания готов.

Не глотайте раствор во время полоскания.

Рекомендуется проводить процедуру полоскания горла в том момент, когда вы чувствуете, что заболеваете, в период наступления холодов, в качестве профилактики сезонной заболеваемости ОРВИ, а также в гигиенических целях.

Дезинфекция

При использовании в условиях лечебно-профилактических учреждений все детали рекомендуется дезинфицировать в течение 30 минут 3% раствором перекиси водорода с 0,5% раствором мощного средства при температуре 18–24°C. После дезинфекции промойте детали устройства не менее трех раз проточной водой.

Срок годности: 3 года. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от 0 до 25 °C и влажности не выше 75%.

Утилизация: При применении в лечебном учреждении использованные изделия должны быть утилизированы в соответствии с правилами и инструкциями, действующими в лечебном учреждении для утилизации медицинских отходов класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Изделия с истекшим сроком годности, должны быть утилизированы, как медицинские отходы класса А в соответствии СанПиН 2.1.7.2790.

При применении в домашних условиях использованные изделия, а также изделия с истекшим сроком годности утилизируются как бытовые отходы.

Производитель, держатель регистрационного удостоверения и организация, принимающая претензии

ООО «Зентива Фарма», Россия, 127030, г. Москва, вн. тер. г. м. о. Тверской ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, пом. VI, +7 499 350 13 49. Info.Russia@zentiva.ru.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02703 от 31.03.2023 г.

Важно: внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Правильное использование устройства и средство для промывания «ДОЛФИН®» поможет Вам безопасно достичь желаемого эффекта.

Дополнительную информацию смотрите на www.dolphin.ru

Дата последнего пересмотра эксплуатационной документации: май 2019



Инструкция по применению

Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН»[®], емкость 120 мл со средствами для промывания, 1 г, № 30 (Рецепт № 1) к медицинскому изделию: Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН»[®], емкость 120 мл по ТУ 32.50.50-001-41078037-2019 (для детей).

Назначение: устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН»[®] (далее – устройство) предназначено для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний посредством промывания и полоскания носоглотки раствором, изготовленным с применением средства для промывания. Устройство относится к изделиям индивидуального пользования и может применяться как в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений, так и в домашних условиях детьми с 4 до 12 лет.

Показания: ринит при ОРВИ и гриппе, синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит), аллергический ринит, атрофический ринит, гипертрофический ринит, вазомоторный ринит, аденоидит, подготовка к операциям и реабилитация после операции в полости носа и околоносовых пазух. Устройство применяется также для профилактики этих заболеваний, промывания и полоскания носоглотки в гигиенических целях.

Противопоказания: полная непроходимость носовых ходов, острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, аденоиды III степени, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, возраст менее 4 лет.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют при соблюдении инструкции по применению.

Технические характеристики:

- Вместимость емкости: 120 мл;
- Высота устройства: 128 мм;
- Наружный диаметр емкости: 49 мм;
- Масса устройства: не более 27 г;
- Масса средства для промывания в одном пакетике: 1 г.

Комплектность:

1. Устройство емкостью 120 мл для многократного применения;
2. Средство для промывания 30 пакетиков по 1 г (Рецепт №1) для одноразового применения;
3. Инструкция по применению;
4. Книжка-раскраска.

Средство для промывания: Изделие применяется совместно со средством для промывания (Рецепт №1), 30 пакетиков по 1 г, входящим в комплект. Средство также может приобретаться отдельно.

Состав средства для промывания (Рецепт №1):

- галит;
- соль поваренная пищевая йодированная;
- калий хлористый;
- натрий двууглекислый (сода пищевая);
- экстракт сухой – шиповник (плоды);
- экстракт сухой – солодка (корень).

Меры предосторожности:

- Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
- Не использовать устройство без насадки.
- Не использовать в положении лежа.
- Если нарушена проходимость носовых ходов и затруднено носовое дыхание, то перед процедурой необходимо высморкаться и/или закапать в нос сосудосуживающий препарат (не входит в комплект). Процедуру промывания носоглотки можно проводить через одну-две минуты после применения сосудосуживающего препарата.
- Не рекомендуется глотать раствор.
- Используйте только свежеприготовленный раствор средства для промывания.
- При высмаркивании приоткройте рот для того, чтобы избежать давления на барабанную перепонку.
- Не применяйте для приготовления раствора очень горячую или очень холодную воду.

При индивидуальной непереносимости шиповника и солодки применение противопоказано.

Внимание!

В течение 10–15 минут после промывания возможно выделение жидкости из носа, поэтому нежелательно делать процедуры непосредственно перед сном. В холодное время года желательно проводить промывание носа за 20–30 минут до выхода на улицу.

Способ применения

Промывание носа

Рекомендуемое число промываний в сутки: 2–4 раза или в соответствии с назначением врача.

Длительность применения: простудные заболевания – 2–4 недели в зависимости от тяжести заболевания, аллергический ринит – в течение всего периода высокой концентрации аллергенов, для профилактики ОРВИ – ежедневно в период эпидемии. Для гигиены полости носа – 1 раз в день ежедневно.

Устройство состоит из емкости для жидкости, трубки, насадки и крышки-дозатора. Перед первым применением разберите устройство и промойте его детали в мыльном растворе или в растворе питьевой соды (2 чайные ложки соды на стакан воды), ополосните в проточной воде, просушите.





Проверьте носовые ходы
 Попросите ребенка подышать поочередно каждой ноздрей, зажав противоположную ноздрю пальцем. Если проходимость хотя бы одного носового хода затруднена, обязательно очистите носовые ходы (попросите ребенка высморкаться или воспользуйтесь сосудо-суживающими препаратами).



Промойте нос
 Ребенок прижимает крышку устройства к промываемой ноздре. Глубоко вдыхает, задерживает дыхание, приоткрывает рот. Плавно, с минимальным давлением сам сжимает емкость. При этом раствор вытекает наружу через другую ноздрю. Не меняя положения тела и головы, аналогично ребенок промывает по очереди левый и правый носовой ход.



Засыпьте средство в устройство и растворите в воде
 Содержимое одного пакетика засыпьте в устройство и наполните его теплой кипяченой питьевой водой до верхней отметки (температура воды не должна превышать 36°C). Закройте емкость крышкой с трубкой и взболтайте до полного растворения средства.



Освободите нос от жидкости
 Когда раствор перестанет вытекать из противоположной ноздри, ребенок утирает устройство от носа и затем разжимает пальцы. Не меняя положения головы, высмаркивается, держа рот приоткрытым.



Удалите остатки раствора
 Ребенок сжимает пустую емкость устройства, вдыхает и задерживает дыхание, закрывает рот. Прикладывает крышку устройства к правой ноздре, закрыв левую ноздрю пальцем свободной руки. Затем разжимает емкость. Также выполняется процедура удаления остатков из левой ноздри. Голову можно поднять только после завершения процедуры.
 После применения разберите устройство, промойте детали теплой водой с моющим средством, а затем проточной водой не менее трех раз, протрите и просушите.



Примите правильное положение
 Ребенок берет в руки устройство с приготовленным раствором и наклоняется вперед на 90°. Лицо обязательно должно быть параллельно полу. При промывании ребенок не должен поворачивать голову в сторону.

Полоскание горла

Применять 1–2 раза в день или в соответствии с назначением врача. Раствор содержимое одного пакетика в 60 мл теплой кипяченой воды (1/4 стакана), температура воды не должна превышать 36°C. Раствор для полоскания готов.

Не глотайте раствор во время полоскания.

Рекомендуется проводить процедуру полоскания горла в том момент, когда вы чувствуете, что заболели, в период наступления холодов, в качестве профилактики сезонной заболеваемости ОРВИ, а также в гигиенических целях.

Дезинфекция

При использовании в условиях лечебно-профилактических учреждений все детали рекомендуется дезинфицировать в течение 30 минут 3% раствором перекиси водорода с 0,5% раствором моющего средства при температуре 18–24°C. После дезинфекции промойте детали устройства не менее трех раз проточной водой.

Срок годности: 3 года. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от 0 до 25 °C и влажности не выше 75%.

Утилизация: при применении в лечебном учреждении использованные изделия должны быть утилизированы в соответствии с правилами и инструкциями.

действующими в лечебном учреждении для утилизации медицинских отходов класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Изделия с истекшим сроком годности, должны быть утилизированы, как медицинские отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

При применении в домашних условиях использованные изделия, а также изделия с истекшим сроком годности утилизируются как бытовые отходы.

Производитель, держатель регистрационного удостоверения и организация, принимающая претензии

000 «Зентива Фарма», Россия, 127030, г. Москва, вн. тер. г. м. о. Тверской, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, пом. VI, +7 499 350 13 48, Info.Russia@zentiva.ru.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02703 от 31.03.2023 г.

Важно: внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Правильное использование устройства и средств для промывания «ДОЛУИН[®]», поможет Вам безопасно достичь желаемого эффекта.

Дополнительную информацию смотрите на www.dofrlph.ru.

Дата последнего пересмотра эксплуатационной документации: май 2019



Инструкция по применению

Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН»[®], емкость 240 мл со средствами для промывания, 2 г, №30 (Рецепт №2) к медицинскому изделию: Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН»[®], емкость 240 мл по ТУ 32.50.50-001-41078037-2019 (для взрослых).

Назначение: Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН»[®] (далее – устройство) предназначено для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний посредством промывания и полоскания носоглотки раствором, изготовленным с применением средства для промывания. Устройство относится к изделиям индивидуального пользования и может применяться как в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений, так и в домашних условиях взрослыми и детьми от 12 лет. Для детей с 4 до 12 лет допускается применение, используя для промывания примерно половину объема.

Показания: ринит при ОРВИ и гриппе, синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит), аллергический ринит, атрофический ринит, гипертрофический ринит, вазомоторный ринит, аденоидит, подготовка к операциям и реабилитация после

операций в полости носа и околоносовых пазух. Устройство применяется также для профилактики этих заболеваний, промывания и полоскания носоглотки в гигиенических целях.

Противопоказания: полная непроходимость носовых ходов, острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, аденоиды III степени, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, возраст менее 4 лет.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют при соблюдении инструкции по применению.

Технические характеристики:

- Вместимость емкости: 240 мл;
- Высота устройства: 147 мм;
- Наружный диаметр емкости: 59 мм;
- Масса устройства: не более 37 г;
- Масса средства для промывания в одном пакетике: 2 г.

Комплектность:

1. Устройство емкостью 240 мл для многократного применения;
2. Средство для промывания 30 пакетиков по 2 г (Рецепт №2) для однократового применения;
3. Инструкция по применению.

Средство для промывания:

Изделие применяется совместно со средством для промывания (Рецепт №2), 30 пакетиков по 2 г, входящим в комплект.

Средство также может приобретаться отдельно.

Состав средства для промывания (Рецепт №2):

- галит;
- натрий двууглекислый (сода пищевая).

Меры предосторожности:

- Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
- Не использовать устройство без насадки.
- Не использовать в положении лежа.
- Если нарушена проходимость носовых ходов и затруднено носовое дыхание, то перед процедурой необходимо высморкаться и/или закапать в нос сосудосуживающий препарат (не входит в комплект). Процедуру промывания носоглотки можно проводить через одну-две минуты после применения сосудосуживающего препарата.
- Не рекомендуется глотать раствор.
- Используйте только свежеприготовленный раствор средства для промывания.
- При высмаркивании приоткройте рот для того, чтобы избежать давления на барабанную перепонку.
- Не применяйте для приготовления раствора очень горячую или очень холодную воду.

Внимание!

В течение 10–15 минут после промывания возможно выделение жидкости из носа, поэтому нежелательно делать процедуры непосредственно перед сном. В холодное время года желательно проводить промывание носа за 20–30 минут до выхода на улицу.

Способ применения

Промывание носа

Рекомендуемое число промываний в сутки: 2–4 раза или в соответствии с назначением врача.

Длительность применения: простудные заболевания – 2–4 недели в зависимости от тяжести заболевания, аллергический ринит – в течение всего периода высокой концентрации аллергенов, для профилактики ОРВИ – ежедневно в период эпидемии. Для гигиены полости носа – 1 раз в день ежедневно.

Устройство состоит из емкости для жидкости, трубки, насадки и крышки-дозатора. Перед первым применением разберите устройство и промойте его детали в мыльном растворе или в растворе питьевой соды (2 чайные ложки соды на стакан воды), ополосните в проточной воде, просушите.





Проверьте носовые ходы

Подышите попеременно каждой ноздрей, зажав противоположную ноздрю пальцем. Если проходимость хотя бы одного носового хода затруднена, обязательно очистите носовые ходы (высморкайтесь или воспользуйтесь сосудосуживающими препаратами).



Засыпьте средство в устройство и растворите в воде

Содержимое одного пакетика засыпьте в устройство и наполните его теплой кипяченой питьевой водой до верхней отметки (температура воды не должна превышать 36°C). Закройте емкость крышкой с трубкой и взболтайте до полного растворения средства.



Примите правильное положение

Возьмите в руки устройство с приготовленным раствором и наклонитесь вперед на 90°. Лицо обязательно должно быть параллельно полу. При промывании не поворачивайте голову в сторону.



Промойте нос

Плотно прижмите крышку устройства к промываемой ноздре. Глубоко вдохните, задержите дыхание, приоткройте рот на время проведения процедуры. Плавно, медленно, с минимальным давлением сжимайте ем-

кость. При этом раствор равномерно заполняет промываемый носовой ход и вытекает наружу через другую ноздрю. Если во время процедуры часть раствора попала в рот, необходимо сплюнуть раствор.

Не меняя положения тела и головы, аналогичным способом промойте другой носовой ход. Промывайте по очереди левый и правый носовой ход, пока не закончится раствор в устройстве.

Освободите нос от жидкости

Когда раствор перестанет вытекать из противоположной ноздри, уберите устройство от носа и затем разомните пальцы. Не меняя положения головы, высморкайтесь, держа рот приоткрытым.

Удалите остатки раствора

Для окончательного удаления из носовых ходов остатков раствора и слизи сожмите пустую емкость устройства, вдохните и задержите дыхание, закройте рот. Плотно приложите крышку устройства к правой ноздре, закройте левую ноздрю пальцем свободной руки. Затем разомните емкость, при этом емкость расправится. Также выполняется процедура удаления остатков раствора и слизи из левой ноздри. Голову можно поднять только после завершения процедуры.

После применения разберите устройство, промойте детали теплой водой с моющим средством, а затем проточной водой не менее трех раз, протрите и просушите.

Полоскание горла

Применять 1–2 раза в день или в соответствии с назначением врача. Растворите содержимое одного пакетика в 120 мл теплой кипяченой воды (1/2 стакана), температура воды не должна превышать 36°C. Раствор для полоскания готов.

Не глотайте раствор во время полоскания. Рекомендуется проводить процедуру полоскания горла в том момент, когда вы чувствуете, что заболели, в период наступления холодов, в качестве профилактики сезонной заболеваемости ОРВИ, а также в гигиенических целях.

Дезинфекция

При использовании в условиях лечебно-профилактических учреждений все детали рекомендуется дезинфицировать в течение 30 минут 3% раствором перекиси водорода с 0,5 % раствором моющего средства при температуре 18–24°C. После дезинфекции промойте детали устройства не менее трех раз проточной водой.

Срок годности: 3 года. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от 0 до 25 °C и влажности не выше 75%.

Утилизация: при применении в лечебном учреждении использованные изделия должны быть утилизированы в соответствии с правилами и инструкциями, действующими в лечебном учреждении для утилизации медицинских отходов класса Б в соответствии с СанПин 2.1.7.2790. Изделия с истекшим сроком годности, должны быть утилизированы, как медицинские отходы класса А в соответствии СанПин 2.1.7.2790.

При применении в домашних условиях использованные изделия, а также изделия с истекшим сроком годности утилизируются как бытовые отходы.

Производитель, держатель регистрационного удостоверения и организация, принимающая претензии

ООО «Зентива Фарма», Россия, 127030, г. Москва, вн. тер. г. м. о. Тверской, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, пом. VI, +7 499 350 13 48, info.Russia@zentiva.ru.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02703 от 31.03.2023 г.

Важно: внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Правильное использование устройства и средств для промывания «ДОЛФИН®» поможет Вам безопасно достичь желаемого эффекта.

Дополнительную информацию смотрите на www.dolphin.ru.

Дата последнего пересмотра эксплуатационной документации: май 2019.



Инструкция по применению

Средство для промывания, 1 г, № 30 (Рецепт №1) к медицинскому названию: Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН»», емкость 120 мл (для детей).

Назначение

Средство для промывания (далее – средство) применяется с устройством оториноларингологическим для промывания индивидуальным «ДОЛФИН» (далее – устройство). Средство предназначено для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний посредством промывания и полоскания носоглотки раствором, изготовленным с применением средства для промывания.

Устройство относится к изделиям индивидуального пользования и может применяться как в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений, так и в домашних условиях детей от 4 лет.

Для взрослых и детей с 12 лет выпускается устройство оториноларингологическое

для промывания «ДОЛФИН» емкость 240 мл со средствами для промывания.

Показания

Ринит при ОРВИ и гриппе, синусит (гайморит, этмоидит), аллергический ринит, атрофический ринит, гипертрофический ринит, вазомоторный ринит, аденоидит, полипы и спайки и реабилитация после операций в полости носа и околоносовых пазух, профилактика гриппа и ОРВИ. Устройство применяется также для профилактики этих заболеваний, промывания и полоскания носоглотки в гигиенических целях.

Противопоказания

полная непроходимость носовых ходов, острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания; адениты III степени, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, возраст менее 4 лет.

Возможные побочные эффекты

Отсутствуют при соблюдении инструкции по применению.

Технические характеристики

• Масса средства для промывания в одном пакете: 1 г.

Комплектность

1. Средство для промывания 30 пакетиков по 1 г (Рецепт №1) для одноразового применения;
2. Инструкция по применению.

Состав средства для промывания (Рецепт №1)

- галил;
- калии дигидрат;
- натрий двууглекислый (сода пищевая);
- экстракт сухой – шиповник (плоды);
- экстракт сухой – солодка (корень).

Средство может входить в комплект Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛФИН» емкостью 120 мл или приобретаться отдельно.

Меры предосторожности

- Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
- Не рекомендуется лить раствор.
- Используйте только свежеприготовленный раствор средства для промывания.
- Не применяйте для приготовления раствора очень горячую или очень холодную воду.

При индивидуальной непереносимости шиповника и солодки применение противопоказано.

Проверьте носовые ходы

Попросите ребенка показать носовую полость. Проверьте носовые ходы пальцем. Если носовые ходы ребенка (попросите ребенка высморкаться и/или воспользоваться судосуживающими препаратами).



Промойте нос

Ребенок плотно прижимает крышку устройства к промывочной полости. Глубоко дышит, задерживает дыхание, прикрывает рот на время проведения процедуры. Плавно, медленно, с минимальным давлением сам смывает емкость. При этом раствор равномерно заполняет промывочную полость и вытекает наружу через другую полость. Если во время процедуры часть раствора попала в рот, необходимо сплюнуть раствор. Не меняя положения тела и головы, аналогичным способом ребенка промывает другой носовой ход.

Засыпьте средство в устройство и растворите в воде

Содержимое одного пакетика засыпьте в устройство и наполните его теплой кипяченой водой до верхней отметки (температура воды не должна превышать 36°C). Зарядите емкость крышкой с трубой и вскопайте до полного растворения средства.



Освободите нос от жидкости

Когда раствор перестанет вытекать из промывочной полости, ребенок убирает устройство от носа и затем разжимает пальцы. Не меняя положения головы, высмаркивается, держа рот приоткрытым.



Примите правильное положение

Ребенок берет в руки устройство с приготовленным раствором и наклоняется вперед на 30°. Лицо обязательно должно быть параллельно полу. При промывании ребенок не должен поворачивать голову в сторону.



бюрок скимает пустую емкость устройства, выдает и задерживает крышку, закрывает рот. Плотно прикладывает крышку устройства к правой полости, закрывает левую полость пальцем свободной руки. Затем разжимает емкость, при этом емкость расширяется. Также выполняется процедура удаления остатка раствора и слизи из левой полости. Голову можно поднять только после завершения процедуры.

После применения разберите устройство, промойте детали теплой водой с мощным средством, а затем проточной водой не менее трех раз, протрите и просушите.

Полоскание горла

Применять 1–2 раза в день или в соответствии с назначением врача.

Растворите содержимое одного пакетика в 60 мл теплой кипяченой воды (1/4 стакана), температура воды не должна превышать 36°C. Раствор для полоскания готов.

Рекомендуется проводить процедуру полоскания горла в том момент, когда вы чувствуете, что заболеваете, в период наступления холодов, в качестве профилактики сезонной заболеваемости ОРВИ, а также в гигиенических целях.

Срок годности 3 года. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от 0 до 25°C и влажности не выше 75%.

Утилизация

При применении в лечебном учреждении изделия с истекшим сроком годности должны быть утилизированы, как медицинские отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

При применении в домашних условиях изделия с истекшим сроком годности утилизируются как бытовые отходы.

Проводитель, держатель регистрационного удостоверения и организация, принимающая претензии
ООО «Зентива Фарма», Россия, 127030, г. Москва, вн. тер. г. м. о. Тверской, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, пом. VI, +7 499 350 13 48, info.russia@zentiva.ru.

Регистрационное удостоверение

№ ФДТ 2018002703 от 31.03.2018 г.

Важно!

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Правильное использование устройства и средство для промывания «ДОЛФИН» поможет Вам и Вашему ребенку безопасно достичь желаемого эффекта.

Дополнительную информацию смотрите на www.dolphin.ru.

Дата последнего пересмотра эксплуатационной документации: май 2019



Инструкция по применению

Средство для промывания, 2 г, № 30 (Рецепт №2), к маркированному изделию: Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛОН» емкостью 240 мл по ТУ 32.50.50-001-41078037-2019 (для взрослых).

Назначение

Средство для промывания (далее – средство) применяется с устройством оториноларингологическим для промывания индивидуальным «ДОЛОН» (далее – устройство). Средство предназначено для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний посредством промывания и полоскания носоглотки раствором, изготовленным с применением средства для промывания.

Устройство относится к изделиям индивидуального пользования и может применяться как в условиях лечебно-профилактических учреждений, так и в домашних условиях взрослых и детей от 12 лет. Для детей с 4 до 12 лет до-

пускается применение, используя для промывания примерно половину объема.

Показания

Ринит при ОРВИ и гриппе, синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит), аллергический ринит, атрофический ринит, гипертрофический ринит, вазомоторный ринит, аденоидит, подтекание из полости носа и околоносовых пазух и операциях и реабилитации после операции. Устройство применяется также для профилактики этик заболеваний, промывания и полоскания носоглотки в гителеносим. целая.

Противопоказания

Полная непроходимость носовых ходов, острый отит и обострение остринического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, заболевания III степени, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, возраст менее 4 лет.

Возможные побочные эффекты

Отсутствуют при соблюдении инструкции по применению.

Технические характеристики

Масса средства для промывания в одном пакете: 2 г.

Комплектность

1. Средство для промывания 30 пакетиков по 2 г (Рецепт №2) для одоразового применения;
2. Инструкция по применению.

Состав средства для промывания (Рецепт №2)

- вода;
- натрия двууглекислый (сода пищевая).

Средство может вводиться в комплект. Устройство оториноларингологическое для промывания индивидуальное «ДОЛОН» емкостью 240 мл или приобретаться отдельно.

Меры предосторожности

- Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
- Длительность применения: прорисудные заболевания – 2–4 недели в зависимости от тяжести заболевания, аллергический ринит – в течение всего периода высокой концентрации аллергена, для профилактики ОРВИ – ежедневно в период эпидемии.

Для гигиены полости носа – 1 раз в день ежедневно.

Внимание! В течение 10–15 минут после промывания возможно выделение жидкости из носа, поэтому желательно делать процедуры непосредственно перед сном. В холодное время года желательно промывать промывание носа за 20–30 минут до выхода на улицу.

Проверьте носовые ходы

Подышите попеременно поочередно на каждую ноздрю, зажав противоположную ноздрю пальцем. Если проходимость хотя бы одного носового хода затруднена, обратитесь к врачу. Если носовые ходы (высокая перегородка) или воспалительные процессы в полости носа.



Промойте нос
Полно прижмите крышку устройства к промываемой ноздре, закрыв ладью ноздрю пальцем свободной руки. Затем разожмите емкость, при этом емкость разстривается. Также выполняются процедуры уделения остатков раствора и слизи из левой ноздри. Голову можно подержать только после завершения процедуры.



Засыпьте средство в устройство и растворите в воде
Содержимое одного пакетика засыпьте в устройство и наполните его теплой кипяченой водой до верхней отметки (температура воды не должна превышать 36°C).

Закройте емкость крышкой с трубкой и вскопайте до полного растворения средства.



Примите правильное положение
Возьмите в руки устройство с подготовленным раствором и наклонитесь вперед на 90°. Лицо обязательно должно быть параллельно полу. При промывании не совершайте осмеву в сторону.

те и задержите дыхание, закройте рот. Полно прижмите крышку устройства к правой ноздре, закрыв ладью ноздрю пальцем свободной руки. Затем разожмите емкость, при этом емкость разстривается. Также выполняются процедуры уделения остатков раствора и слизи из левой ноздри. Голову можно подержать только после завершения процедуры.

После применения разберите устройство, промойте детали теплой водой с мыльным раствором, а затем протечной водой не менее трех раз, протрите и просушите.

Положение горла

Применять 1–2 раза в день или в соответствии с назначением врача.

Растворите содержимое одного пакетика в 120 мл теплой кипяченой воды (22–24°C), температура воды не должна превышать 36°C. Раствор для полоскания готов.

Не платите раствор во время полоскания. Рекомендуется проводить процедуру полоскания горла в том момент, когда вы чувствуете, что заболели, в период наступления холодов, в качестве профилактики сезонной заболеваемости ОРВИ, а также в гигиенических целях.

Утилизация: При применении в лечебном учреждении кадры с инструкцией свободной горкости, должны быть утилизированы, как медицинские отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.279.
При применении в домашних условиях изделия с истекшим сроком годности утилизируются как бытовые отходы.

Производитель, держатель регистрационного удостоверения и организация, принимающая претензии
ООО «Зентива Фарма», Россия, 127030, г. Москва, вн. тер. г. м. о. Тверской, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, пом. VI, +7 499 350 13 48, info@zentiva.ru, zentiva.ru

Регистрационное удостоверение

№ ФСР 200802703 от 31.03.2023 г.

Важно: внимательно ознакомиться с инструкцией. Правильное использование устройства и средства для промывания «ДОЛОН» позволяет вам безопасно достичь желаемого эффекта.
Дополнительную информацию смотрите на www.dofr.ru

Дата последнего пересмотра эксплуатационной документации: май 2019

