



sertsa[®]
Разам. Для жыцця



Инструкция по применению

**Ланцеты автоматические стерильные
одноразовые sertsa[®], модель Press 2, размер:**

17G 2.0 мм

21G 1.8 мм

21G 2.2 мм

26G 1.8 мм


28G 1.8 мм

30G 1.5 мм

НАЗНАЧЕНИЕ

Ланцеты автоматические стерильные одноразовые sertsas® (далее – Ланцеты) используются для забора капиллярной крови.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

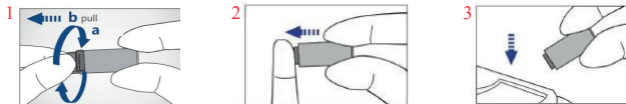










1. Осторожно открутите защитный колпачок, отделив его от Ланцета.
2. Плотнo прижмите Ланцет к месту прокола для активации. Не убирайте Ланцет от места прокола до тех пор, пока не раздастся звуковой щелчок.
3. Утилизируйте использованный Ланцет в подходящий контейнер для сбора острых предметов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ХРАНЕНИЕ. УТИЛИЗАЦИЯ

1. Не используйте Ланцет, если до использования был отсоединен колпачок.
2. Проверьте дату "Использовать до" на упаковке и не используйте Ланцеты после истечения срока годности.
3. Ланцет предназначен для одноразового применения, не используйте его повторно.
4. Хранить Ланцеты в упаковке в хорошо проветриваемом помещении, не допускать контакта с ядовитыми, вредными и коррозионными веществами.
5. Утилизируйте использованный Ланцет в подходящий контейнер для сбора острых предметов.

СИМВОЛЫ

	Изготовитель
	Обратитесь к инструкции по применению
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Медицинское изделие
	Использовать до
	Запрет на повторное применение
	Радиационная стерилизация
	Код партии
	Дата изготовления