

RU Ранний результат

Для применения за 2-4 дня до предполагаемого начала менструации.

24ч
В любое время

Почему МАМАТЕСТ?

Обладает очень высокой чувствительностью и его можно использовать уже за 2-4 дня до предполагаемого начала менструации. Благодаря чувствительности 10 мМЕ/мл ХГЧ, его можно делать в любое время суток.



1. ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ

- В сухой контейнер соберите порцию мочи.
- Откройте индивидуальную упаковку, держите тест-полоску за конец с надписью hCG.
- Погрузите тест в контейнер до отметки «МАХ» на 3 секунды.


2. ПОДОЖДИТЕ 3 МИНУТЫ

Положите тест на сухую горизонтальную поверхность и подождите 3 минуты для оценки результатов.



3. ОЦЕНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Через 3 минуты оцените результаты.

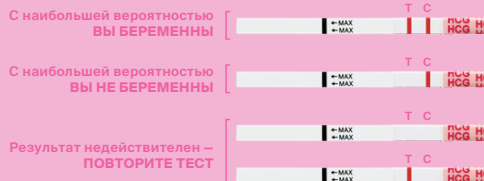

ВНИМАНИЕ! ПО ПРОШЕСТВИИ 5 МИНУТ РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!

- Если тест на беременность дал положительный результат, пожалуйста, обратитесь к гинекологу, чтобы подтвердить беременность и получить рекомендации.
- В случае если тест дал отрицательный результат, но менструация по-прежнему задерживается, обратитесь к гинекологу, а также к врачу-эндокринологу для выявления причин нарушения менструального цикла.
- При получении неожиданных или противоречивых результатов также обратитесь к врачу.

Тест для определения беременности МАМАТЕСТ®

ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!

Добро пожаловать в мир точной и заботливой диагностики. Мы понимаем, что ожидание может быть волнительно. МАМАТЕСТ® создан, чтобы помочь вам получить ясный ответ в важный момент вашей жизни.

Благодаря высокой чувствительности 10 мМЕ/мл, МАМАТЕСТ® улавливает малейшее присутствие гормона ХГЧ – главного «вестника» наступившей беременности. На протяжении первых недель беременности концентрация ХГЧ в моче удваивается каждые 48 часов, и результат с каждым днем становится более явным и четким.

Инструкция по применению

Тест предназначен для качественного определения хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче женщины на ранней стадии беременности.

Область применения и функциональное назначение медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика, самотестирование в домашних условиях непрофессиональным пользователем. Тест является вспомогательным средством в диагностике, медицинское изделие предназначено для диагностики in vitro.

Потенциальные потребители изделия: ЛПУ любого профиля, аптечные организации.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей: непрофессионалы, а также врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

Содержит специальные диагностические реагенты: моноклональные антитела к ХГЧ, проверенные методом ELISA на активность, и визуализатор на основе коллоидного золота.

Производитель: Беромед ГмбХ Хоспитал Продактс®, Кроненштрассе 19, 10117 Берлин, Германия.
Beromed GmbH Hospital Products®, Kronenstrasse 19, 10117 Berlin, Germany, +49 30 2039 95 91; info@beromed.de

Уполномоченный представитель производителя и импортер в РБ: ООО «Медилюкс фарм», УНП 191478169; 220004, Минск, улица Замковая, дом 28, комната 10; +375 17 388 29 94; info@medilux.by

www.mamatest.eu

CE 0537 IVD IN VITRO DIAGNOSTIC

Дата последнего пересмотра: 10.09.2025/14371 B504188-2, B504188-3

Значение символов:

Производитель
 Номер партии
 Дата изготовления

Срок годности до
 Хранить в сухом месте
 Беречь от солнечного света

Не использовать повторно
 См. инструкцию по применению
 Предупреждение

Медицинское изделие для диагностики in vitro
 Знак европейского соответствия

MAMATEST®

DE Frühes Ergebnis

Anwendung 2-4 Tage vor dem erwarteten Beginn der Periode empfohlen

24h
Zu jeder
Zeit

Warum MAMATEST?

MAMATEST® hat eine sehr hohe Sensitivität und kann 2-4 Tage vor dem erwarteten Beginn der Menstruation angewendet werden. Dank der Sensitivität von 10 mIU/ml hCG kann er zu jeder Tageszeit durchgeführt werden.

1. TEST DURCHFÜHREN

- Sammeln Sie Ihren Morgenurin in einem trockenen Behälter.
- Die Einzelverpackung öffnen, den Teststreifen am mit den Buchstaben hCG beschrifteten Ende halten.
- Tauchen Sie den Teststreifen senkrecht bis zur Markierung „MAX“ für 3 Sekunden in den Behälter ein.



2. 3 MINUTEN WARTEN

Legen Sie den Test auf eine trockene, waagerechte Fläche und warten Sie 3 Minuten, um das Ergebnis auszuwerten.



3. ERGEBNIS AUSWERTEN

Bewerten Sie das Ergebnis nach 3 Minuten.

Sie sind mit größter Wahrscheinlichkeit **SCHWANGER**:



Sie sind mit größter Wahrscheinlichkeit **NICHT SCHWANGER**:



Das Ergebnis ist ungültig – **ERNEUTER TEST!**



ACHTUNG! NACH 5 MINUTEN KANN DAS ERGEBNIS NICHT MEHR BEWERTET WERDEN.

- Wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, wenden Sie sich bitte an einen Gynäkologen, um die Schwangerschaft zu bestätigen und Empfehlungen zu erhalten.
- Falls der Test negativ ist, die Menstruation jedoch weiterhin ausbleibt, wenden Sie sich an einen Gynäkologen sowie an einen Endokrinologen, um die Ursachen der Menstruationsstörung abzuklären.
- Wenn Sie unerwartete oder widersprüchliche Ergebnisse erhalten, wenden Sie sich ebenfalls an einen Arzt.

Schwangerschaftstest MAMATEST®

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ANWENDUNG!

Willkommen in der Welt präziser und sorgfältiger Diagnostik. Wir wissen, wie aufregend das Warten sein kann. MamaTest® hilft Ihnen, in einem wichtigen Moment Ihres Lebens eine klare Antwort zu erhalten.

Dank der hohen Sensitivität von 10 mIU/ml erkennt MamaTest selbst geringste Mengen des Hormons hCG – dem wichtigsten „Botenstoff“ einer Schwangerschaft. In den ersten Schwangerschaftswochen verdoppelt sich die hCG-Konzentration im Urin alle 48 Stunden, und das Testergebnis wird von Tag zu Tag deutlicher und klarer.

Gebrauchsanweisung

Der Test ist für den qualitativen Nachweis des humanen Choriongonadotropins (hCG) im Urin einer Frau im Frühstadium der Schwangerschaft bestimmt.

Anwendungsbereich und Zweckbestimmung dieses Medizinproduktes: Klinische Labordiagnostik, Durchführung des Selbsttests zu Hause von einer nicht fachkundigen Benutzerin. Der Test gilt als diagnostisches Hilfsmittel, als Medizinprodukt nur für die In-Vitro-Diagnostik.

Potentielle Konsumenten dieses Produktes: Beliebige medizinische Einrichtungen, Apotheken.

Qualifikationsniveau der potentiellen Benutzer: Nicht fachkundige Benutzer sowie Laborärzte und medizinische Laborgehilfen.

Enthält spezielle diagnostische Reagenzien: Monoklonale Antikörper gegen hCG, getestet auf ELISA-Aktivität, und einen kolloidalen Goldvisualisierer.

Hersteller: Beromed GmbH Hospital Products; Kronenstraße 19, DE-10117 Berlin; +49 30 2039 95 91; info@beromed.de

Vertretungsberechtigte des Herstellers und Importeur in der Republik Belarus: OOO Medilux pharm, Steuer- und Gebühren-ID-Nr. 191478169; uliza Samkowaja 28, Zi. 10, 220004, Minsk; Tel. +37517 388 29 94; info@medilux.by

Die vollständige Gebrauchsanleitung finden Sie auf der Webseite:

www.mamatest.eu

CE 0537 IVD IN VITRO DIAGNOSTIC

Datum der letzten Revision: 10.09.2025/14371 B504188-2, B504188-3

! Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung dieses Medizinprodukts

- Der Test ist bei Temperatur von +10°C bis +30°C durchzuführen.
- Nicht bei aufgerissener oder beschädigter Primärverpackung verwenden. Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.
- Das Testergebnis nicht nach mehr als 5 Minuten ablesen.
- Teststreifen nicht wiederverwenden.
- Testbestandteile enthalten keine gesundheitsschädlichen Stoffe.
- Komponenten der Indikatorelemente in Nutzkonzentrationen sind nicht toxisch.
- Bei der Anwendung des Tests sind die allgemein anerkannten Hygieneregeln einzuhalten.
- Falsch positive Ergebnisse können durch Extrateringravidität oder eine Zyste, sowie hCG-haltige Medikamente verursacht werden.
- Dieses medizinische Produkt enthält keine Arzneimittel oder pharmazeutische Substanzen.
- Bei positiven oder zweifelhaften Ergebnissen wird eine ärztliche Beratung empfohlen.
- Bestandteile des Medizinprodukts und der Verpackung nicht einnehmen.
- Nach der Anwendung ist das Medizinprodukt über den Hausmüll zu entsorgen.
- Haltbarkeit: 3 Jahre. Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.
- Bei Temperatur von +4°C bis +30°C in Einzelverpackung lagern. Keinem direkten Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Den Test unzugänglich für Kinder aufbewahren.
- Den Teststreifen gleich nach dem Öffnen der Einzelverpackung verwenden.
- Transport der Tests ist mit allen bedeckten Transportmitteln gem. den für entsprechende Transportmittel festgestellten Vorschriften und Forderungen bei Temperatur von -20°C bis +40°C erlaubt.

Symbol-Bedeutung

Hersteller
 Fertigungslosnummer, Charge
 Herstellungsdatum

Verwendbar bis
 Trocken aufbewahren
 Vor Sonnenlicht schützen

Nicht wiederverwenden
 Gebrauchsanweisung beachten
 Achtung

In vitro Diagnostik Medizinprodukt
 CE-Kennzeichnung

MAMA TEST®