

## 1. ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ

- В сухой контейнер соберите утреннюю порцию мочи.
- Откройте индивидуальную упаковку, держите тест-полоску за конец с надписью hCG.
- Погрузите тест в контейнер до отметки «MAX» на 3 секунды.


## 2. ПОДОЖДИТЕ 3 МИНУТЫ

Положите тест на сухую горизонтальную поверхность и подождите 3 минуты для оценки результатов.



## 3. ОЦЕНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Через 3 минуты оцените результаты.

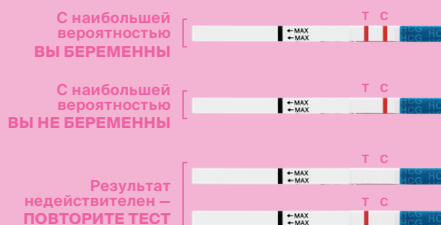

**ВНИМАНИЕ!** ПО ПРОШЕСТВИИ 5 МИНУТ РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!

- Если результат теста кажется сомнительным, проведите повторное тестирование через 2 дня.
- Окончательный вывод о наступлении беременности принимает медицинский работник после проведения дополнительных анализов и обследований.

## Тест для определения беременности МАМАТЕСТ®

ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!

### Инструкция по применению

Тест предназначен для качественного определения хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче женщины на ранней стадии беременности. Чувствительность – 20 мМЕ/мл.

**Область применения и функциональное назначение медицинского изделия:** клиническая лабораторная диагностика, самотестирование в домашних условиях непрофессиональным пользователем. Тест является вспомогательным средством в диагностике, медицинское изделие предназначено для диагностики in vitro.

**Потенциальные потребители изделия:** ЛПУ любого профиля, аптечные организации.

**Профессиональный уровень потенциальных пользователей:** непрофессионалы, а также врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

**Производитель:** Беромед ГмбХ Хоспитал Продактс®, Кроненштрассе 19, 10117 Берлин, Германия.  
Beromed GmbH Hospital Products®, Kronenstrasse 19, 10117 Berlin, Germany, +49 30 2039 95 91; [info@beromed.de](mailto:info@beromed.de)

**Уполномоченный представитель производителя и импортер в РБ:** ООО «Медилюкс фарм», УНП 191478169; 220004, Минск, улица Замковая, дом 28, комната 10; +375 17 388 29 94; [info@medilux.by](mailto:info@medilux.by)

[www.mamatest.eu](http://www.mamatest.eu)



Дата последнего пересмотра: 10.09.2025 / 14371 B500012-1

### ⚠ Меры предосторожности при применении медицинского изделия

- Тестирование производить при температуре от +10 °C до +30 °C.
- Не следует использовать тест при нарушении целостности первичной упаковки и после истечения срока годности.
- Не оценивайте результат теста по прошествии 5 минут.
- Тест-полоски предназначены только для однократного использования.
- Тест не содержит каких-либо вредных для организма человека веществ.
- Компоненты индикаторных элементов в используемых концентрациях нетоксичны.
- При использовании теста следует соблюдать общепринятые правила санитарии.
- Ложноположительные результаты могут быть вызваны наличием внематочной беременности и кисты, а также лекарствами, содержащими ХГЧ.
- В составе изделия отсутствуют лекарственные средства и фармацевтические субстанции.
- В случае получения положительного или сомнительного результата рекомендуется обратиться к врачу.
- Не принимать внутрь компоненты медицинского изделия и упаковки.
- После использования медицинское изделие следует утилизировать как бытовой мусор.
- Срок годности изделия – 3 года. Не следует использовать изделия с истекшим сроком годности.
- Хранить в индивидуальной упаковке при температуре от +4 °C до +30 °C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Использовать тест-полоску сразу же после вскрытия индивидуальной упаковки.
- Транспортирование тестов должно производиться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами и требованиями, установленными на данном виде транспорта, при температуре от -20 °C до +40 °C.
- Изготовитель гарантирует соответствие медицинского изделия национальным и международным стандартам на продукцию, а также всем требованиям нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантии производителя распространяются на изделие до истечения срока его годности, указанного на упаковке, и относятся к неоткрытому, неповрежденному и правильно хранящемуся изделию.

#### Значение символов:


- Производитель
- Номер партии
- Дата изготовления

- Срок годности до
- Хранить в сухом месте
- Беречь от солнечного света

- Не использовать повторно
- См. инструкцию по применению
- Предупреждение

- Медицинское изделие для диагностики in vitro
- Знак европейского соответствия

# МАМАТЕСТ®

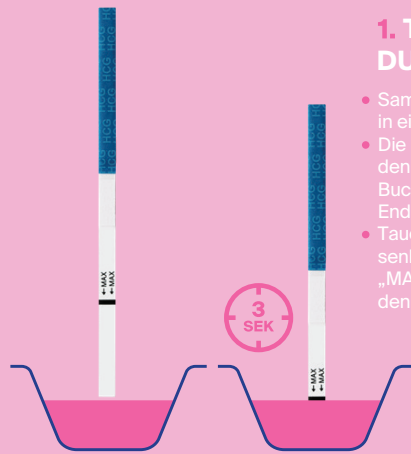

## 1. TEST DURCHFÜHREN

- Sammeln Sie Ihren Morgenurin in einem trockenen Behälter.
- Die Einzelverpackung öffnen, den Teststreifen am mit den Buchstaben hCG beschrifteten Ende halten.
- Tauchen Sie den Teststreifen senkrecht bis zur Markierung „MAX“ für 3 Sekunden in den Behälter ein.


## 2. 3 MINUTEN WARTEN

Legen Sie den Test auf eine trockene, waagerechte Fläche und warten Sie **3 Minuten**, um das Ergebnis auszuwerten.



## 3. ERGEBNIS AUSWERTEN

Bewerten Sie das Ergebnis nach **3 Minuten**.

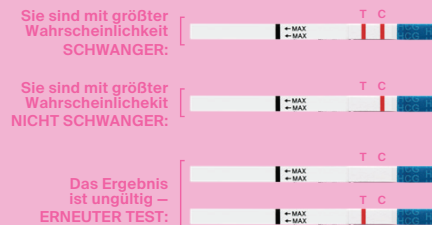

**ACHTUNG! NACH 5 MINUTEN KANN DAS ERGEBNIS NICHT MEHR BEWERTET WERDEN.**

- Wenn das Testergebnis zweifelhaft erscheint, wiederholen Sie den Test nach zwei Tagen.
- Die endgültige Aussage über den Beginn einer Schwangerschaft trifft ein Arzt nach weiteren Tests und Untersuchungen.

# MAMACHECK® Schwangerschaftstest

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ANWENDUNG!

## Gebrauchsanweisung

Der Test dient der qualitativen Bestimmung von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin einer Frau in einem frühen Stadium der Schwangerschaft.

Die Erkennungsschwelle für hCG ist 20 mIU/ml.

**Anwendungsbereich und Funktionszweck des Medizinprodukts:** Klinische Labordiagnostik, Selbsttest zu Hause durch Laien. Der Test dient als Hilfsmittel in der Diagnostik und ist ausschließlich für die In-vitro-Diagnostik bestimmt. Potenzielle Anwender des Produkts: Gesundheitseinrichtungen jeglicher Art, Apotheken.

**Anwender:** Laien sowie Ärzte für klinische Labordiagnostik und Medizinisch-technische Laborassistenten.

**Hersteller:** Beromed GmbH Hospital Products; Kronenstr. 19, DE-10117 Berlin; +49 30 2039 95 91; [info@beromed.de](mailto:info@beromed.de)

**Vertretungsberechtigte des Herstellers und Importeur in der Republik Belarus:** OOO Medilux pharm, Steuer- und Gebühren-ID-Nr. 191478169; uliza Samkowaja 28, Zi. 10, 220004, Minsk; Tel. +37517 388 29 94; [info@medilux.by](mailto:info@medilux.by)

Die vollständige Gebrauchsanleitung finden Sie auf der Webseite:

[www.mamatest.eu](http://www.mamatest.eu)



Datum der letzten Revision: 10.09.2025 / 14371 B500012-1

## ⚠️ Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Medizinprodukts

- Der Test ist bei Temperatur von +10°C bis +30°C durchzuführen.
- Nicht bei aufgerissener oder beschädigter Primärverpackung verwenden. Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.
- Das Testergebnis nicht nach mehr als 5 Minuten ablesen.
- Teststreifen nicht wiederverwenden.
- Testbestandteile enthalten keine gesundheitsschädlichen Stoffe.
- Komponenten der Indikatorelemente in Nutzkonzentrationen sind nicht toxisch.
- Bei der Anwendung des Tests sind die allgemein anerkannten Hygieneregeln einzuhalten.
- Falsch positive Ergebnisse können durch Extrateringravidität oder eine Zyste, sowie hCG-haltige Medikamente verursacht werden.
- Dieses medizinische Produkt enthält keine Arzneimittel oder pharmazeutische Substanzen.
- Bei positiven oder zweifelhaften Ergebnissen wird eine ärztliche Beratung empfohlen.
- Bestandteile des Medizinprodukts und der Verpackung nicht einnehmen.
- Nach der Anwendung ist das Medizinprodukt über den Hausmüll zu entsorgen.
- Haltbarkeit: 3 Jahre. Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.
- Bei Temperatur von +4°C bis +30°C in Einzelverpackung lagern. Keinem direkten Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Den Test unzugänglich für Kinder aufbewahren.
- Den Teststreifen gleich nach dem Öffnen der Einzelverpackung verwenden.
- Transport der Tests ist mit allen bedeckten Transportmitteln gem. den für entsprechende Transportmittel festgestellten Vorschriften und Forderungen bei Temperatur von -20°C bis +40°C erlaubt.
- Der Hersteller gewährleistet, dass das Medizinprodukt bei Einhaltung der Bedingungen für Anwendung, Transport und Lagerung den nationalen und internationalen produktspezifischen Normen sowie allen maßgeblichen regulatorischen Anforderungen entspricht. Die Herstellergarantie gilt bis zum Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verwendbarkeitsdatums und bezieht sich auf ein ungeöffnetes, unbeschädigtes und ordnungsgemäß gelagertes Produkt.

### Symbol-Bedeutung

Hersteller	Verwendbar bis	Nicht wiederverwenden	In vitro Diagnostik Medizinprodukt
Fertigungslosnummer, Charge	Trocken aufbewahren	Gebrauchsanweisung beachten	CE-Kennzeichnung
Herstellungsdatum	Vor Sonnenlicht schützen	Achtung	

# MAMACHECK®