


Для применения за 2-4 дня до предполагаемого начала менструации.



### Почему MAMATEST?

Обладает очень высокой чувствительностью и его можно использовать уже за 2-4 дня до предполагаемого начала менструации. Благодаря чувствительности 10 мМЕ/мл ХГЧ, его можно делать в любое время суток.

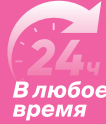

### 1. ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ

Снимите защитный колпачок и выберите один из следующих способов проведения теста:

#### Струя мочи:

Подставьте впитывающий наконечник под струю мочи на 10 секунд, держа тест почти вертикально. Следите, чтобы моча не попала на другие зоны теста.

#### ИЛИ

#### Собранный образец:

В сухой контейнер соберите мочу. Погрузите тест в контейнер до отметки «MAX» на 10 секунд.



### 2. ПОДОЖДИТЕ 3 МИНУТЫ

Положите тест на сухую горизонтальную поверхность и подождите 3 минуты для оценки результата.



### 3. ОЦЕНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Через 3 минуты оцените результат.



С наибольшей вероятностью **ВЫ БЕРЕМЕННЫ**



С наибольшей вероятностью **ВЫ НЕ БЕРЕМЕННЫ**



Результат недействителен – **ПОВТОРИТЕ ТЕСТ**



**ВНИМАНИЕ! ПО ПРОШЕСТВИИ 5 МИНУТ РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!**

- Если тест на беременность дал положительный результат, пожалуйста, обратитесь к гинекологу, чтобы подтвердить беременность и получить рекомендации.
- В случае если тест дал отрицательный результат, но менструация по-прежнему задерживается, обратитесь к гинекологу, а также к врачу-эндокринологу для выявления причин нарушения менструального цикла.
- При получении неожиданных или противоречивых результатов также обратитесь к врачу.

## Ультрасенситивный струйный тест для ранней диагностики беременности MAMATEST®

ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!

Добро пожаловать в мир точной и заботливой диагностики. Мы понимаем, что ожидание может быть волнительно. MAMATEST® создан, чтобы помочь вам получить ясный ответ в важный момент вашей жизни.

Благодаря высокой чувствительности 10 мМЕ/мл, MAMATEST® улавливает малейшее присутствие гормона ХГЧ – главного «вестника» наступившей беременности. На протяжении первых недель беременности концентрация ХГЧ в моче удваивается каждые 48 часов, и результат с каждым днем становится более явным и четким.

### Инструкция по применению

Тест предназначен для качественного определения хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче женщины на ранней стадии беременности.

**Область применения и функциональное назначение медицинского изделия:** клиническая лабораторная диагностика, самотестирование в домашних условиях непрофессиональным пользователем. Тест является вспомогательным средством в диагностике, медицинское изделие предназначено для диагностики in vitro.

**Потенциальные потребители изделия:** ЛПУ любого профиля, аптечные организации.

**Профессиональный уровень потенциальных пользователей:** непрофессионалы, а также врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

**Содержит специальные диагностические реагенты:** моноклональные антитела к ХГЧ, проверенные методом ELISA на активность, и визуализатор на основе коллоидного золота.

**Производитель:** Беромед ГмбХ Хоспитал Продактс®, Кроненштрассе 19, 10117 Берлин, Германия.  
Beromed GmbH Hospital Products®, Kronenstrasse 19, 10117 Berlin, Germany, +49 30 2039 95 91; info@beromed.de

**Уполномоченный представитель производителя и импортер в РБ:** ООО «Медилюкс фарм», УНП 191478169; 220004, Минск, улица Замковая, дом 28, комната 10; +375 17 388 29 94; info@medilux.by

www.mamatest.eu

CE 0537

IVD

IN VITRO DIAGNOSTIC

Дата последнего пересмотра: 10.09.2025/14371 B500654-1

#### Значение символов:

- Производитель
- Номер партии
- Дата изготовления

- Срок годности до
- Хранить в сухом месте
- Беречь от солнечного света

- Не использовать повторно
- См. инструкцию по применению
- Предупреждение

- Медицинское изделие для диагностики in vitro
- Знак европейского соответствия

### Меры предосторожности при применении медицинского изделия

- Тестирование производить при температуре от +10 °C до +30 °C.
- Не следует использовать тест при нарушении целостности первичной упаковки и после истечения срока годности.
- Не оценивайте результат теста по прошествии 5 минут.
- Тест-полоски предназначены только для одноразового использования.
- Тест не содержит каких-либо вредных для организма человека веществ.
- Компоненты индикаторных элементов в используемых концентрациях нетоксичны.
- При использовании теста следует соблюдать общепринятые правила санитарии.
- Ложноположительные результаты могут быть вызваны наличием внематочной беременности и кисты, а также лекарствами, содержащими ХГЧ.
- В составе изделия отсутствуют лекарственные средства и фармацевтические субстанции.
- В случае получения положительного или сомнительного результата рекомендуется обратиться к врачу.
- Не принимать внутрь компоненты медицинского изделия и упаковки.
- После использования медицинское изделие следует утилизировать как бытовой мусор.
- Срок годности изделия – 3 года. Не следует использовать изделия с истекшим сроком годности.
- Хранить в индивидуальной упаковке при температуре от +4 °C до +30 °C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Использовать тест-полоску сразу же после вскрытия индивидуальной упаковки.
- Транспортирование тестов должно производиться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами и требованиями, установленными на данном виде транспорта, при температуре от -20 °C до +40 °C.

MAMATEST®

Anwendung 2-4 Tage vor dem erwarteten Beginn der Periode empfohlen



### Warum MAMATEST?

MAMATEST® hat eine sehr hohe Sensitivität und kann 2-4 Tage vor dem erwarteten Beginn der Menstruation angewendet werden. Dank der Sensitivität von 10 mIU/ml hCG kann er zu jeder Tageszeit durchgeführt werden.



### 1. TEST DURCHFÜHREN

Entfernen Sie die Kappe und wählen Sie eine der nachfolgenden Testmethoden.

**Urinstrahl:**

Halten Sie die Spitze 10 Sekunden lang unter den Urinstrahl. Halten Sie den Test dabei fast senkrecht. Achten Sie darauf, dass Urin nicht die anderen Testfelder trifft.

..... oder .....

**Entnommene Probe:**

Sammeln Sie den Urin in einem trockenen Behälter. Tauchen Sie den Test bis zur Markierung „MAX“ 10 Sekunden lang in den Behälter ein.



### 2. 3 MINUTEN WARTEN

Legen Sie den Test auf eine trockene, waagerechte Fläche und warten Sie 3 Minuten, um das Ergebnis auszuwerten.

### 3. ERGEBNIS AUSWERTEN

Bewerten Sie das Ergebnis nach 3 Minuten.



Sie sind mit größter Wahrscheinlichkeit **SCHWANGER**



Sie sind mit größter Wahrscheinlichkeit **NICHT SCHWANGER**



Das Ergebnis ist ungültig – **ERNEUTER TEST**



**ACHTUNG! NACH 5 MINUTEN KANN DAS ERGEBNIS NICHT MEHR BEWERTET WERDEN.**

- Wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, wenden Sie sich bitte an einen Gynäkologen, um die Schwangerschaft zu bestätigen und Empfehlungen zu erhalten.
- Falls der Test negativ ist, die Menstruation jedoch weiterhin ausbleibt, wenden Sie sich an einen Gynäkologen sowie an einen Endokrinologen, um die Ursachen der Menstruationsstörung abzuklären.
- Wenn Sie unerwartete oder widersprüchliche Ergebnisse erhalten, wenden Sie sich ebenfalls an einen Arzt.

## Ultrasensitiver Urintest zur frühen Schwangerschaftsdiagnose

### MAMATEST®

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ANWENDUNG!

Willkommen in der Welt präziser und sorgfältiger Diagnostik. Wir wissen, wie aufregend das Warten sein kann. MamaTest® hilft Ihnen, in einem wichtigen Moment Ihres Lebens eine klare Antwort zu erhalten.

Dank der hohen Sensitivität von 10 mIU/ml erkennt MamaTest selbst geringste Mengen des Hormons hCG – dem wichtigsten „Botenstoff“ einer Schwangerschaft. In den ersten Schwangerschaftswochen verdoppelt sich die hCG-Konzentration im Urin alle 48 Stunden, und das Testergebnis wird von Tag zu Tag deutlicher und klarer.

### Gebrauchsanweisung

Der Test ist für den qualitativen Nachweis des humanen Choriongonadotropins (hCG) im Urin einer Frau im Frühstadium der Schwangerschaft bestimmt.

**Anwendungsbereich und Zweckbestimmung dieses Medizinproduktes:** Klinische Labordiagnostik, Durchführung des Selbsttests zu Hause von einer nicht fachkundigen Benutzerin. Der Test gilt als diagnostisches Hilfsmittel, als Medizinprodukt nur für die In-Vitro-Diagnostik.

**Potentielle Konsumenten dieses Produktes:** Beliebige medizinische Einrichtungen, Apotheken.

**Qualifikationsniveau der potentiellen Benutzer:** Nicht fachkundige Benutzer sowie Laborärzte und medizinische Laborgehilfen.

**Enthält spezielle diagnostische Reagenzien:** Monoklonale Antikörper gegen hCG, getestet auf ELISA-Aktivität, und einen kolloidalen Goldvisualisierer.

**Hersteller:** Beromed GmbH Hospital Products; Kronenstr. 19, DE-10117 Berlin; +49 30 2039 95 91; [info@beromed.de](mailto:info@beromed.de)

**Vertretungsberechtigte des Herstellers und Importeur in der Republik Belarus:** OOO Medilux pharm, Steuer- und Gebühren-ID-Nr. 191478169; uliza Samkowaja 28, Zi. 10, 220004, Minsk; Tel. +37517 388 29 94; [info@medilux.by](mailto:info@medilux.by)

Die vollständige Gebrauchsanleitung finden Sie auf der Webseite:

[www.mamatest.eu](http://www.mamatest.eu)



Datum der letzten Revision: 10.09.2025/14371 B500654-1

### ! Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung dieses Medizinprodukts

- Der Test ist bei Temperatur von +10°C bis +30°C durchzuführen.
- Nicht bei aufgerissener oder beschädigter Primärverpackung verwenden. Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.
- Das Testergebnis nicht nach mehr als 5 Minuten ablesen.
- Teststreifen nicht wiederverwenden.
- Testbestandteile enthalten keine gesundheitsschädlichen Stoffe.
- Komponenten der Indikatorelemente in Nutzkonzentrationen sind nicht toxisch.
- Bei der Anwendung des Tests sind die allgemein anerkannten Hygieneregeln einzuhalten.
- Falsch positive Ergebnisse können durch Extrauteringravität oder eine Zyste, sowie hCG-haltige Medikamente verursacht werden.
- Dieses medizinische Produkt enthält keine Arzneimittel oder pharmazeutische Substanzen.
- Bei positiven oder zweifelhaften Ergebnissen wird eine ärztliche Beratung empfohlen.
- Bestandteile des Medizinprodukts und der Verpackung nicht einnehmen.
- Nach der Anwendung ist das Medizinprodukt über den Hausmüll zu entsorgen.
- Haltbarkeit: 3 Jahre. Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.
- Bei Temperatur von +4°C bis +30°C in Einzelverpackung lagern. Keinem direkten Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Den Test unzugänglich für Kinder aufbewahren.
- Den Teststreifen gleich nach dem Öffnen der Einzelverpackung verwenden.
- Transport der Tests ist mit allen bedeckten Transportmitteln gem. den für entsprechende Transportmittel festgestellten Vorschriften und Forderungen bei Temperatur von -20°C bis +40°C erlaubt.

### Symbol-Bedeutung

- |                             |                          |                             |                                    |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Hersteller                  | Verwendbar bis           | Nicht wiederverwenden       | In vitro Diagnostik Medizinprodukt |
| Fertigungslosnummer, Charge | Trocken aufbewahren      | Gebrauchsanweisung beachten | CE-Kennzeichnung                   |
| Herstellungsdatum           | Vor Sonnenlicht schützen | Achtung                     |                                    |

**MAMATEST®**