

**Инструкция по применению
СПРЕЙ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ НОСА И ГОРЛА НА ОСНОВЕ РАСТВОРА
КОЛЛОИДНОГО СЕРЕБРА
«SILVER WATER Multiwave»
ТУ BY 192002495.008-2022**

Наименование: Спрей для орошения носа и горла на основе раствора коллоидного серебра «SILVER WATER Multiwave»

Состав: вода очищенная, водный раствор коллоидного серебра.

Назначение: предназначен для применения у взрослых и детей от трех месяцев, как вспомогательное средство, для поддержания естественной функции и регенерации слизистой оболочки носа, рта и глотки, в том числе при фарингите, ангине, простудных заболеваниях и кашле, сопровождающихся дискомфортом в области горла и хрипотой, острых и хронических респираторных заболеваниях полости носа, околоносовых пазух, носоглотки (инфекционных, атрофических). Подходит для использования в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения: Оториноларингология

Показания к применению: профилактика и комплексное лечение острых и хронических респираторных заболеваний полости носа, околоносовых пазух, носоглотки, полости рта и глотки (инфекционных, атрофических):

- острые и хронические риниты, синуситы, аденоидиты, фарингиты, тонзиллиты
- вазомоторные и субатрофические риниты, в том числе аллергические
- ларингиты, стоматиты, гингивиты, пародонтиты

Профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (гриппа, ОРВИ и т.д.)

Профилактика и комплексное лечение состояний после хирургических вмешательств в полости рта, носа и горла.

Свойства: спрей для орошения носа и горла на основе раствора коллоидного серебра «SILVER WATER Multiwave» способствует физическому удалению избытка жидкости и слизи из носоглотки, снимает отек и заложенность носа, носовых пазух, рта и глотки.

- Уменьшает заложенность и восстанавливает дыхание при насморке, в том числе аллергическом;
- Тщательно промывает все отделы полости носа, рта и глотки;
- Оказывает противовоспалительное действие, снимает раздражение;
- Повышает терапевтическую эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку полости носа, рта и глотки;
- Увлажняет слизистую носовой полости в условиях чрезмерно сухого воздуха при работе систем центрального отопления, кондиционирования, в условиях неблагоприятной экологической обстановки, а также во время авиаперелетов;
- Уменьшает дискомфорт и сухость в полости рта и горла;
- Стимулирует защитную функцию реснитчатого эпителия оболочки полости носа;
- Повышает местный иммунитет.

**Коллоидное серебро имеет широкий спектр антибактериальной,
противовирусной и противогрибковой активности.**

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав спрея.

Особые указания:

- Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями.

- Безопасен при проглатывании!

Способ применения

1. Для санации горла:

Спрей распыляют в горло с помощью распылителя 1-3 раза (предварительно поставив носик распылителя в горизонтальное положение), направляя на очаг воспаления. После процедуры сплевывают остатки спрея в раковину, ротовую полость не споласкивают водой, чтобы спрей продолжал действовать 5-10 минут.

2. Для санации носа:

Носик распылителя поставить в вертикальное положение и распылить спрей по 1-2 раза в каждую ноздрю. Излишки жидкости, попавшие из носа в рот, сплевывают в раковину. Спрей должен воздействовать на очаг воспаления не менее 5-10 минут. Повторять процедуру желательно не чаще, чем 1 раз в 1 час, и не более 5 раз в день.

Внимание: перед применением необходимо встряхнуть флакон! При выпадении носика распылителя вставьте его на прежнее место.

Побочные эффекты: не выявлены

Меры предосторожности: перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

По гигиеническим причинам и для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов флакон должен использоваться только одним человеком.

Осмотрите спрей и упаковку перед применением. Не используйте спрей в случае нарушения целостности упаковки и самого медицинского изделия.

Форма выпуска и упаковка: спрей во флаконе с насадкой распыляющей и инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия транспортировки: спреи транспортируют в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортировки: температура от плюс 5 °C до плюс 25 °C.

Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте. Хранение спреев осуществляют при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C при относительной влажности не более 80 % (при плюс 25 °C). Не допускать замерзания.

Срок годности: срок годности спрея для орошения носа и горла на основе раствора коллоидного серебра «SILVER WATER Multiwave» - 3 года с даты изготовления; срок годности после вскрытия - 12 месяцев.

Не применять после истечения срока годности.

Стерильность: спрей является нестерильным.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Чистая река»

Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д. 187, корп. 8, к. 118