

**Инструкция по применению**  
**СПРЕЙ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ГОРЛА СРЕДНИЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ «SEA HARD Multiwave»**  
ТУ ВУ 192002495.008-2022

**Наименование:** спрей для орошения горла средний гипертонический «SEA HARD Multiwave».

**Состав:** вода очищенная, морская соль, гиалуроновая кислота (натриевая соль).

**Назначение:** предназначен для применения у взрослых и детей старше шести лет, как вспомогательное средство, для поддержания естественной функции и регенерации слизистой оболочки рта и глотки, в том числе при фарингите, ангине, простудных заболеваниях и кашле, сопровождающихся дискомфортом в области горла и хрипотой.

Подходит для использования в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях.

**Область применения:** Оториноларингология

**Показания к применению:**

Профилактика и комплексное лечение острых и хронических респираторных заболеваний полости рта и глотки (инфекционных, атрофических):

- острые и хронические фарингиты, тонзиллиты
- ларингиты, стоматиты, гингивиты, пародонтиты

Профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (гриппа, ОРВИ и т.д.)

Профилактика и комплексное лечение состояний после хирургических вмешательств в полости рта и горла.

**Свойства:** спрей для орошения горла средний гипертонический «SEA HARD Multiwave», способствуя физическому удалению избытка жидкости и слизи из горла и глотки, снимает отек и заложенность рта и глотки

- Тщательно промывает все отделы полости рта и глотки;
- Оказывает противовоспалительное действие, снимает раздражение;
- Повышает терапевтическую эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку полости рта и глотки;
- Уменьшает дискомфорт и сухость в полости рта и горла;
- Повышает местный иммунитет.

- Процедура не опасна беременным женщинам, поэтому врачи рекомендуют ее в качестве первой лечебной и профилактической меры при воспалительных патологиях гортани.

- Спрей отлично справляется с дискомфортом, покраснением и скоплением гнойно-некротического налета в лакунах миндалин при воспалении вирусной и бактериальной этиологии.

Орошение горла спреем эффективно

- предотвращает распространение инфекции вниз по дыхательным путям;
- повышает местную сопротивляемость эпителия инфекциям;
- уменьшает воспаления, разжижает густую мокроту и ускоряет ее отхождение;
- облегчает процессы дыхания и проглатывания пищи;
- для глубокого очищения слизистой и лакун от гнойных пробок, слущенного эпителия и патологического микробного налета.

При фарингите и ларингите обработка позволяет увлажнить слизистую, что крайне важно при данных заболеваниях, так как ротоглотка становится воспаленной и отечной.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав спрея.

**Особые указания:**

- Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями.
- Безопасен при проглатывании.

**Способ применения:**

Спрей распыляют в горло с помощью распылителя 1-3 раза (предварительно поставив носик распылителя в горизонтальное положение), направляя на очаг воспаления. После процедуры сплевывают остатки спрея в раковину, ротовую полость не споласкивают водой, чтобы спрей продолжал действовать 10-15 минут.

**Внимание:** перед применением необходимо встряхнуть флакон! При выпадении носика распылителя вставьте его на прежнее место.

**Побочные эффекты:** не выявлены

**Меры предосторожности:** перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

По гигиеническим причинам и для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов флакон должен использоваться только одним человеком.

Осмотрите спрей и упаковку перед применением. Не используйте спрей в случае нарушения целостности упаковки и самого медицинского изделия.

**Форма выпуска и упаковка:** спрей во флаконе с насадкой распыляющей и инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия транспортировки:** спреи транспортируют в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортировки: температура от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

**Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте. Хранение спрея осуществляют при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С при относительной влажности не более 80 % (при плюс 25 °С). Не допускать замерзания.

**Срок годности:** срок годности спрея для орошения горла среднего гипертонического «SEA HARD Multiwave» - 3 года с даты изготовления; срок годности после вскрытия – 16 месяцев.

Не применять после истечения срока годности.

**Стерильность:** спрей является нестерильным.

**Изготовитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Чистая река»

Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д. 187, корп. 8, к. 118